

 Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	OTO P/V ELEGANCE 1/11
--	---	---



Italiano

MANUALE ISTRUZIONI

DELLA POLTRONA

OTO P/V ELEGANCE



**OTO
P/V
ELEGANCE**



	<p>Leggere il presente manuale prima di utilizzare la poltrona</p>
---	---

VERSIONE N.00	REDATTO <i>Marrone F. Andraghetti G.</i>	DATA 08/10/2005	APPROVATO <i>M. Longo</i>	DATA 08/10/2005
-------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Questo documento è realizzato da Euroclinic S.r.l. Unipersonale.
È vietata la duplicazione e la divulgazione non autorizzata
Tel +39 0546 656031 Fax +39 0542 656691 e-mail info@euroclinic www.euroclinic.it

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**


Tensione di alimentazione	: 230v 50Hz
Tensione ai motori	: 24v
Spinta motore sollevamento	: 4000 N
Spinta schienale	: 800 N
Capacita' di sollevamento	: Kg 145
Potenza	: 90 V.A.
Protezione da fusibile	: 1,6 A

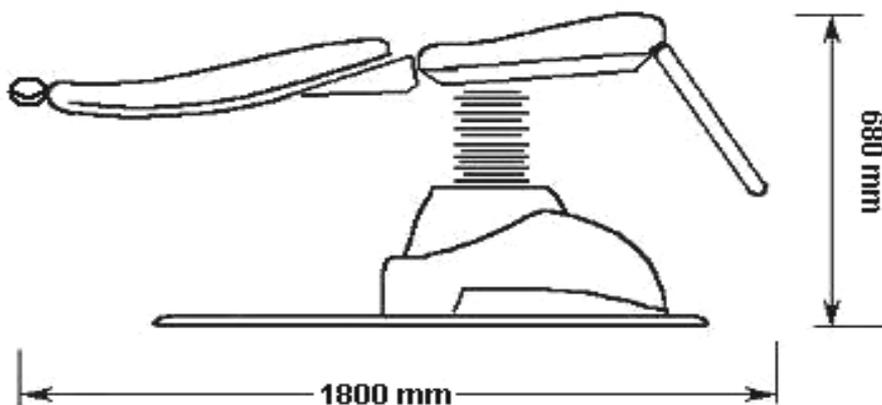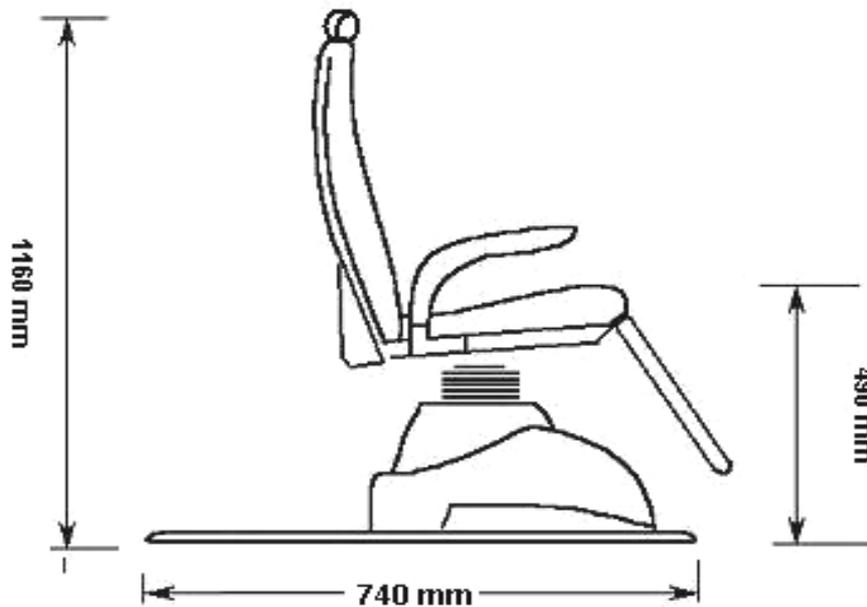

 Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	OTO P/V ELEGANCE
		3/11


• **INSTALLAZIONE**

Sollevarla la poltrona dal bancale di imballo ed appoggiarla al suolo lentamente senza inclinarla. Collegare la spina di alimentazione ad una presa elettrica, collegare il connettore del pedale e azionare l'interruttore generale (vedi Fig 1).

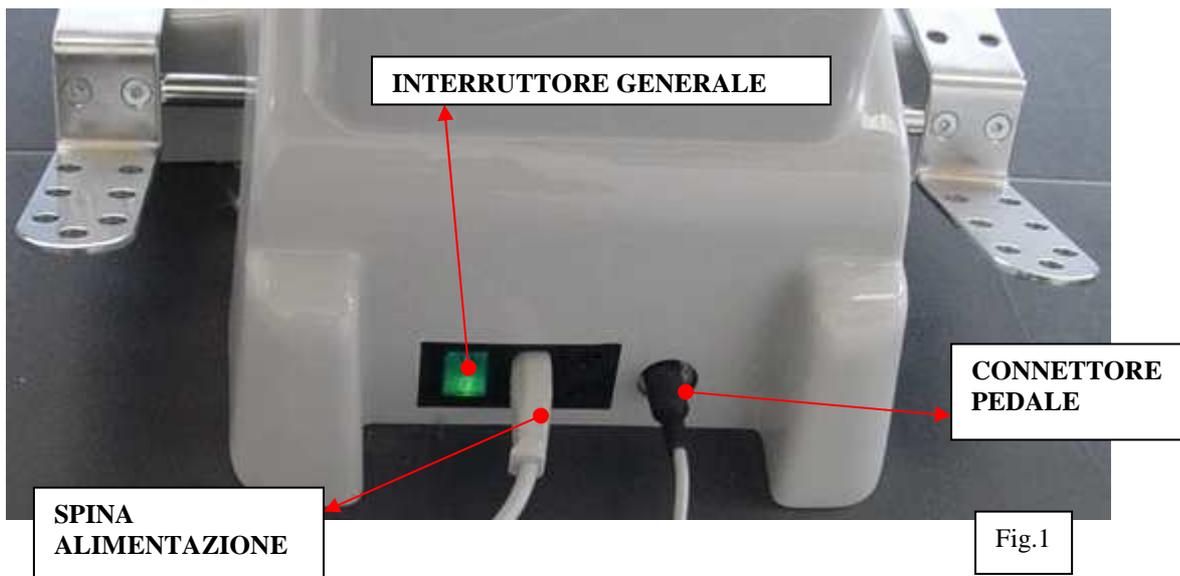


• **FUNZIONAMENTO**

La poltrona **OTO P/V ELEGANCE** ha la possibilita' di ruotare a 360° . Per liberare la rotazione e' sufficiente tenere le leve cromate "A" in posizione ALTA (vedi Figura) rispetto alla vista frontale e viceversa per bloccare la poltrona nella posizione voluta e' sufficiente tenere le leve "A" in posizione BASSA (vedi Figura) .

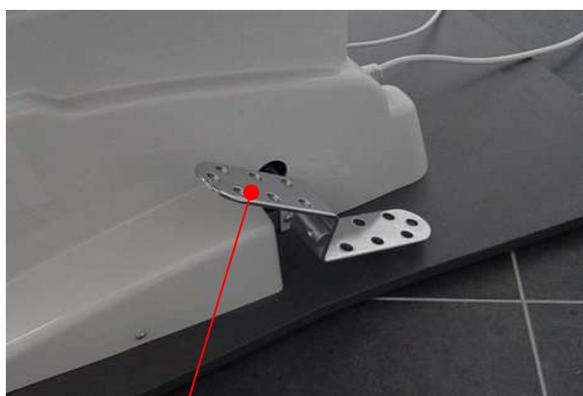

LEVA "A" IN ALTA POLTRONA LIBERA DI RUOTARE E MUOVERSI

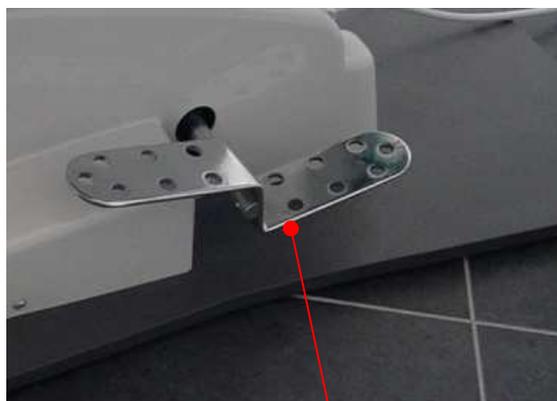

LEVA "A" IN BASSO POLTRONA BLOCCATA

 Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	OTO P/V ELEGANCE
		4/11



ATTENZIONE!

Il blocco della rotazione (LEVE IN BASSO) **IMPEDISCE** anche il movimento elettrico di salita e discesa della poltrona!

• **MOVIMENTO DI SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO**

Prima di attivare il sollevamento, verificare che la rotazione sia sbloccata premendo sulla parte anteriore delle leve “A” come definito nel paragrafo precedente. Per sollevare la poltrona premere il pedale dalla parte “UP” viceversa per abbassarla premere il pedale sulla parte “DOWN” (vedi Fig 2)


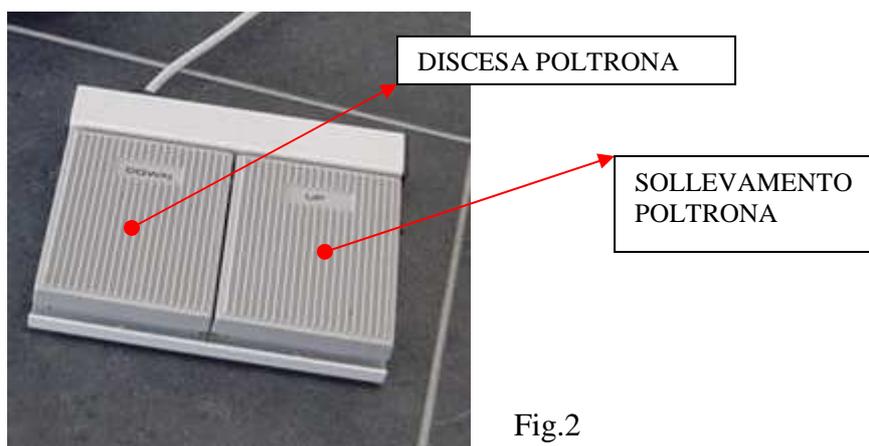


Fig.2

• **REGOLAZIONE INCLINAZIONE SCHIENALE**

E' possibile regolare l'inclinazione dello schienale tramite la leva “B”(Fig 3); spingendo indietro tale leva si sblocca il movimento e forzando lo schienale verso il basso lo si può posizionare a piacimento fino alla posizione di lettino. Una volta arrivati alla posizione desiderata e' sufficiente rilasciare la leva . Grazie al basamento allargato e' possibile portare la poltrona in posizione “lettino” senza correre rischi di ribaltamento.

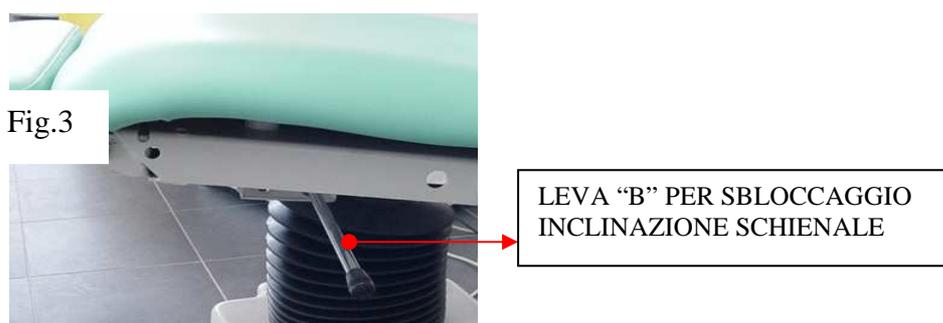

 Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	<p style="text-align: center;">OTO P/V ELEGANCE</p> 5/11
--	--	--

 **ATTENZIONE!**

Nel caso in cui lo schienale fosse reclinato e se sulla poltrona non ci fosse il paziente, al momento dello sblocco dello schienale tramite la LEVA "B", e' opportuno accompagnare con una mano lo schienale in avanti in modo da evitare che il movimento sia troppo veloce. Infatti in questo caso la molla a gas è scarica del peso del paziente!

- **BRACCIOLO MOBILE**

Per facilitare la salita e la discesa del paziente, i braccioli possono essere orientati lateralmente, come illustrato in figura 4.

Occorre sollevare verso l'alto il bracciolo facendolo poi ruotare verso l'esterno. Per riportarlo nella posizione originaria si devono ripetere le operazioni al contrario.



Fig. 4

- **MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA**

I materiali impiegati nella costruzione della **OTO P/V ELEGANCE** sono idonei a sopportare le operazioni di pulizia e disinfezione previste nelle presenti istruzioni.

La grande varietà di farmaci e prodotti chimici utilizzati nello studio medico possono danneggiare le superfici verniciate e le parti in materiale plastico.

Le prove e le ricerche effettuate hanno dimostrato che le superfici non possono essere completamente protette dall'aggressione di tutti i prodotti reperibili sul mercato.

Gli effetti di questi prodotti dipendono essenzialmente dal tempo di permanenza sulle superfici.

 Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	<p style="text-align: center;">OTO P/V ELEGANCE</p> 6/11
--	--	--

È importante rimuovere immediatamente con un panno umido tali sostanze dalle superfici dell'apparecchio.

Per pulire utilizzare un panno inumidito; non spruzzare i detergenti direttamente sulla poltrona.



ATTENZIONE!

Non utilizzare prodotti contenenti alcool, ammoniaca, sostanze abrasive o benzolo.

Le concentrazioni riportate in seguito sono le massime ammesse e non devono essere superate:

Ammonii quaternari: massimo 2%

Aldeide glutarica: massimo 2%

La EUROCLINIC NON RISPONDE DEI DANNI PROVOCATI DALL'USO DI DISINFETTANTI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENCATE

• **AVVERTENZE E PRECAUZIONI**





La poltrona **OTO P/V ELEGANCE** e' alimentata con tensione di rete 230Vac e' obbligatorio quindi spegnere l'interruttore generale e staccare la spina da essa prima di effettuare qualsiasi intervento (cambio fusibili, sostituzione ricambi, pulizia etc:).



Non appoggiare pesi oltre 40 Kg sul gambale unico quando esso e' in posizione orizzontale in quanto la molla potrebbe non sorreggerli!


ESPLOSO OTO P/V ELEGANCE

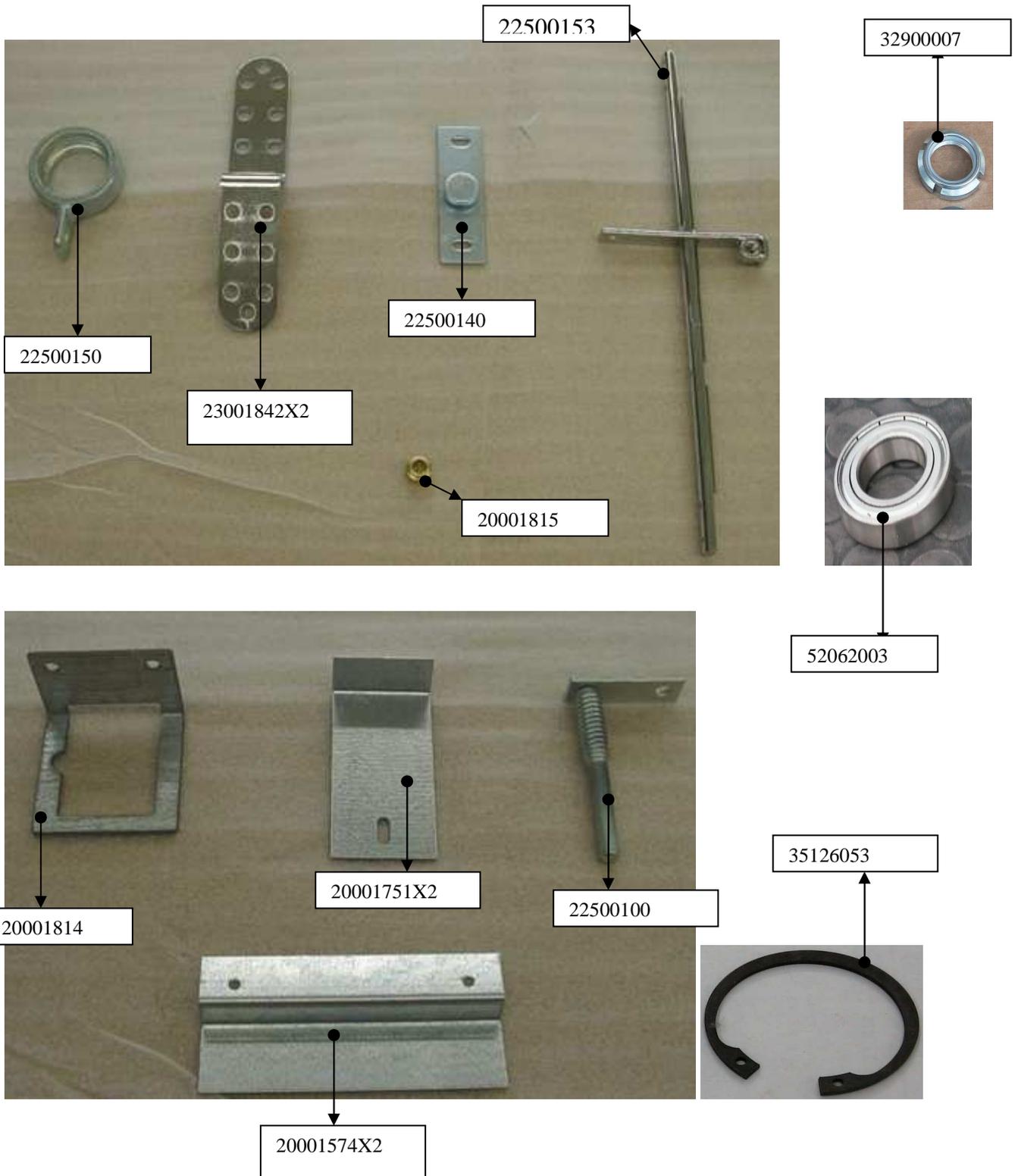

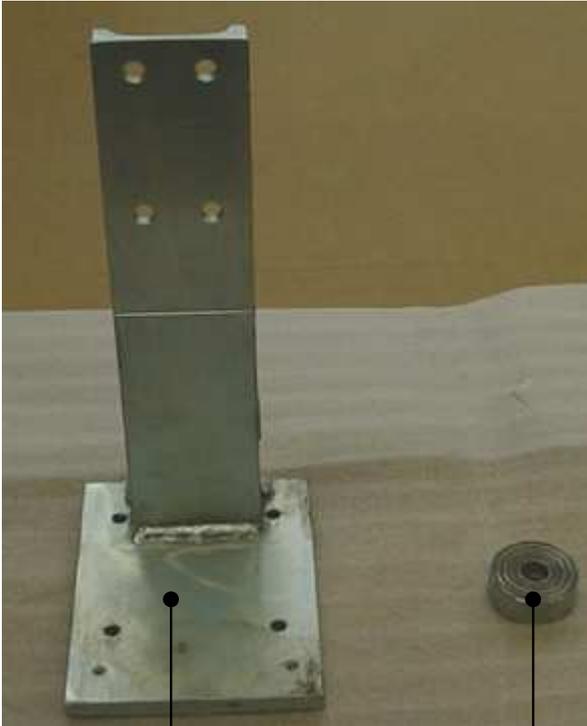

22500147

23001501

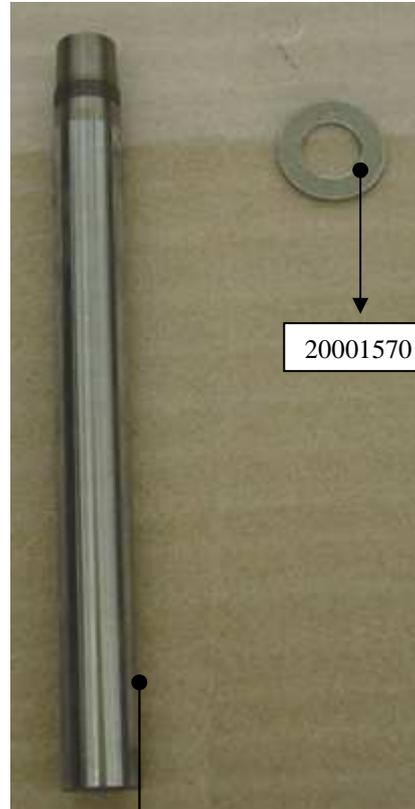


20001570

20001577










20001816

20001798

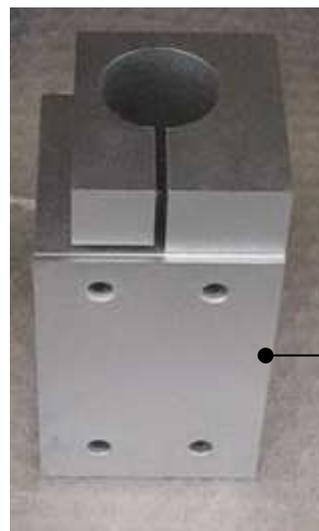


220001571

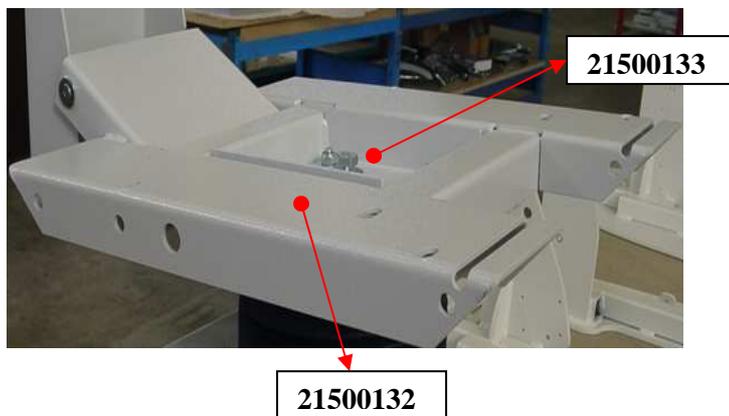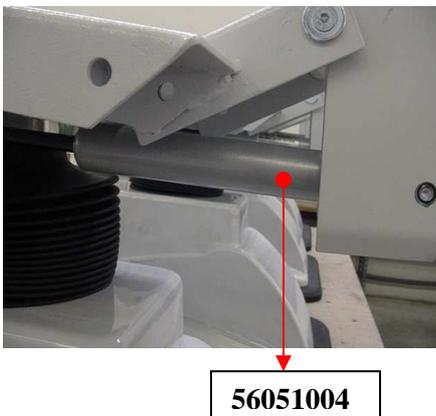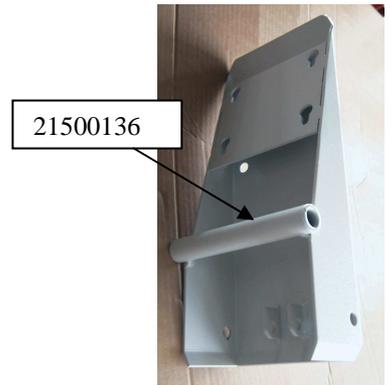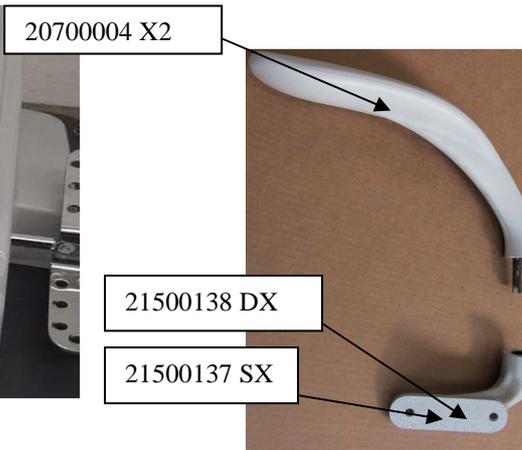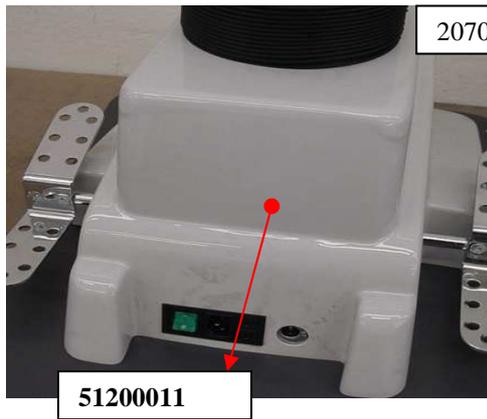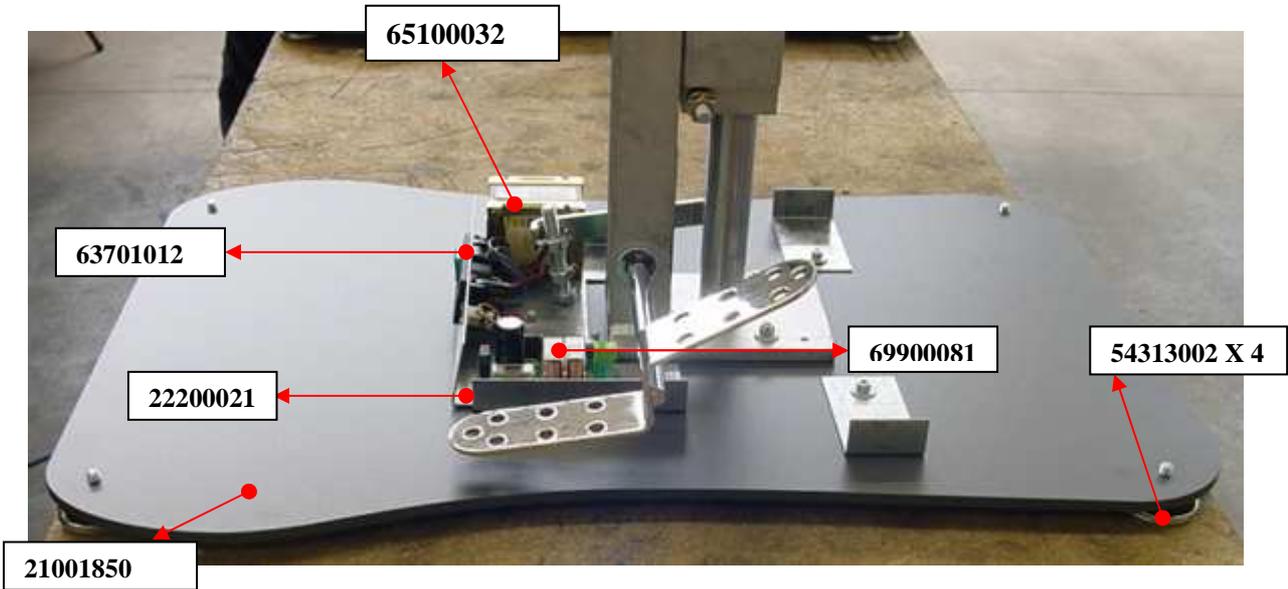

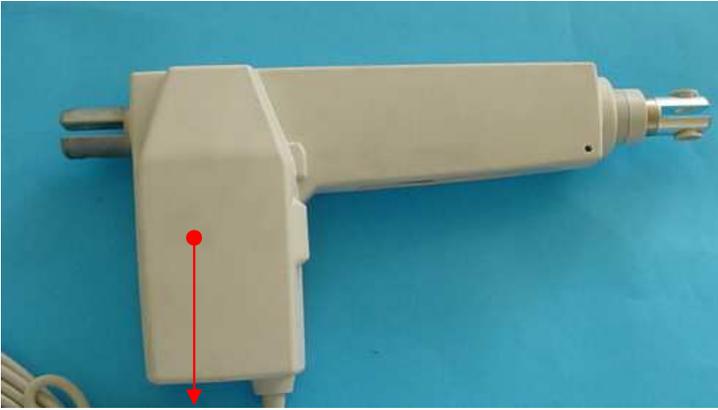

56036014

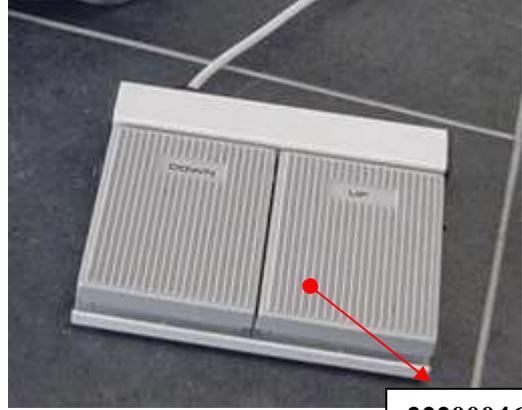


22200046

51200014




207160--

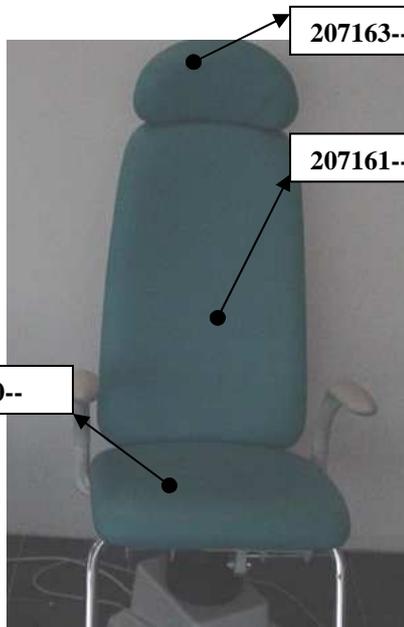


207163--

207161--

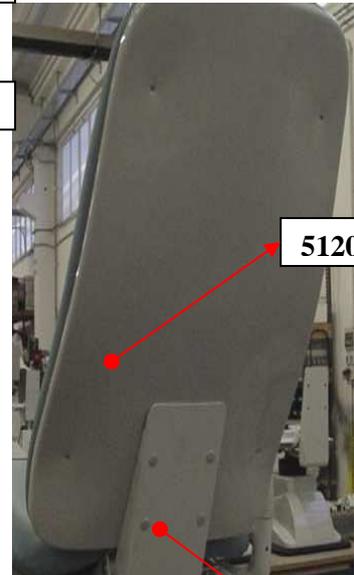

51200008

54333003X4

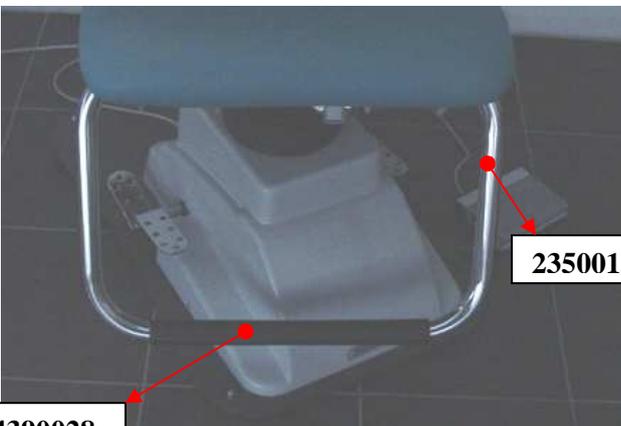

23500134

54390028

 Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 40026 Castelbolognese(RA) ITALIA	Manuale istruzioni Versione N° 00 del 08/10/2005	OTO P/V ELEGANCE 11/11
--	--	--

• **ETICHETTA IDENTIFICATIVA**

L'etichetta identificativa della poltrona si trova sul braccio di sollevamento, al di sotto della seduta.

E' compilata nel seguente modo:

1. Il tipo di poltrona è contrassegnato da un puntino a fianco del nome
2. Nell' "orologio" in alto a destra sono contrassegnati l'anno e il mese di costruzione .
3. Nelle tabelle in basso a destra sono contrassegnati la classe di appartenenza secondo le normative sulla sicurezza elettrica , i Volts e gli Hertz della Tensione di alimentazione, il consumo massimo in Volts/Ampere della poltrona
4. In basso a sinistra si pone con un pennarello indelebile la matricola alfa-numerica (serial-number) che permette di identificare univocamente la poltrona.
5. Sono riportati inoltre il simbolo CE e il simbolo dello smaltimento secondo quanto prescritto dalle norme Europee

 Euroclinic		 DATE																																									
EUROCLINIC S.r.l. Unipersonale Via Dell'Artigianato, 305/319 48014 - Castelbolognese (RA) - ITALY																																											
<table border="1"> <tr><td>PODOPEG</td><td></td></tr> <tr><td>PODOPEG/E</td><td></td></tr> <tr><td>OTOP/V ELEG.</td><td></td></tr> <tr><td>OTOP/V</td><td></td></tr> <tr><td>PODOP/V</td><td></td></tr> <tr><td>OTOPEX</td><td></td></tr> <tr><td>PODODEX</td><td></td></tr> </table>	PODOPEG		PODOPEG/E		OTOP/V ELEG.		OTOP/V		PODOP/V		OTOPEX		PODODEX		<table border="1"> <tr><td>CONCEPT</td><td></td></tr> <tr><td>OTOCONCEPT</td><td></td></tr> <tr><td>OTOP/V PROF.</td><td></td></tr> <tr><td>OTOP/I</td><td></td></tr> <tr><td>GYNEX</td><td></td></tr> <tr><td>DENPEX</td><td></td></tr> </table>	CONCEPT		OTOCONCEPT		OTOP/V PROF.		OTOP/I		GYNEX		DENPEX		CLASSE	<table border="1"> <tr><td>I</td><td>II</td><td>B</td><td>B_F</td><td>V.</td><td>115</td><td>230</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	I	II	B	B_F	V.	115	230							
PODOPEG																																											
PODOPEG/E																																											
OTOP/V ELEG.																																											
OTOP/V																																											
PODOP/V																																											
OTOPEX																																											
PODODEX																																											
CONCEPT																																											
OTOCONCEPT																																											
OTOP/V PROF.																																											
OTOP/I																																											
GYNEX																																											
DENPEX																																											
I	II	B	B_F	V.	115	230																																					
SERIAL NUMBER _____		V.A.	<table border="1"> <tr><td>50</td><td>70</td><td>120</td><td>H_z.</td><td>50</td><td>60</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	50	70	120	H_z.	50	60																																		
50	70	120	H_z.	50	60																																						