

POLTRONA ELETTRICA - REF 28040



Manuale di Istruzioni

INDICE

1. Riguardo al Manuale di Istruzioni	2
2. Icone Identificative	2
3. Avvertenze e Istruzioni indicative	3
4. Avvertenza	3
5. Composizione del Lettino Elettrico Beauty	4
6. Area di Applicazione	4
7. Istruzioni di Installazione	5
8. Pannello di Istruzioni e funzionamento	6
9. Dati Tecnici.....	7
10. Manutenzione	8
11. Layout connessione circuiteria	8
12. Soluzioni ai malfunzionamenti	9

Si prega di leggere il presente Manuale di Istruzioni prima di utilizzare il Lettino Elettronico Beauty.

1 **Riguardo al Manuale di Istruzioni**

Il presente Manuale di Istruzioni funge esclusivamente da riferimento per l'impiego del presente lettino, la nostra Azienda non si riterrà responsabile di nessuna conseguenza derivante dall'utilizzo del presente Manuale di Istruzioni per altra strumentazione.

2 **Icone Identificative**



Contrassegno del Cavo di Messa a Terra




Funzione Contrassegno del Cavo di Messa a Terra



Secondo il grado di protezione da Elettrocuzione, il presente Lettino Elettronico Beauty è classificato come tipo II e BF.

3 **Avvertenze e Istruzioni Indicative**

- Nei momenti di connessione, funzionamento e regolazione del presente lettino si prega di attenersi alle seguenti istruzioni e di conservare debitamente il presente Manuale di Istruzioni.
- Il presente Lettino Beauty utilizza un cavo di alimentazione a 3 fili, assicurarsi che venga collegato ad una presa a 3 cavi con messa a terra; assicurarsi che il Lettino Elettronico sia collegato in maniera sicura con un cavo di messa a terra per evitare l'elettrocuzione dell'utente, ciò assicurerà inoltre il normale funzionamento dello strumento.
- Tutte le prese, pulsanti o cavi dovrebbero essere tenuti lontano dall'acqua durante l'utilizzo.
- Lo schienale del Lettino Beauty può essere regolato in differenti angolature tenendo premuto il pulsante o pedale di controllo; quando in Lettino Beauty è in posizione seduta e completamente sdraiata, è vietato posizionare mani, piedi o testa nelle aree ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ (vedi grafico di seguito).
- Tutte le prese, pulsanti o cavi di collegamento non dovrebbero essere utilizzati a seguito di danneggiamento.
- La frequenza di lavoro dell'Asta di spinta Elettronica è 6min/ora.
- Solamente professionisti dovrebbero riparare lo strumento.

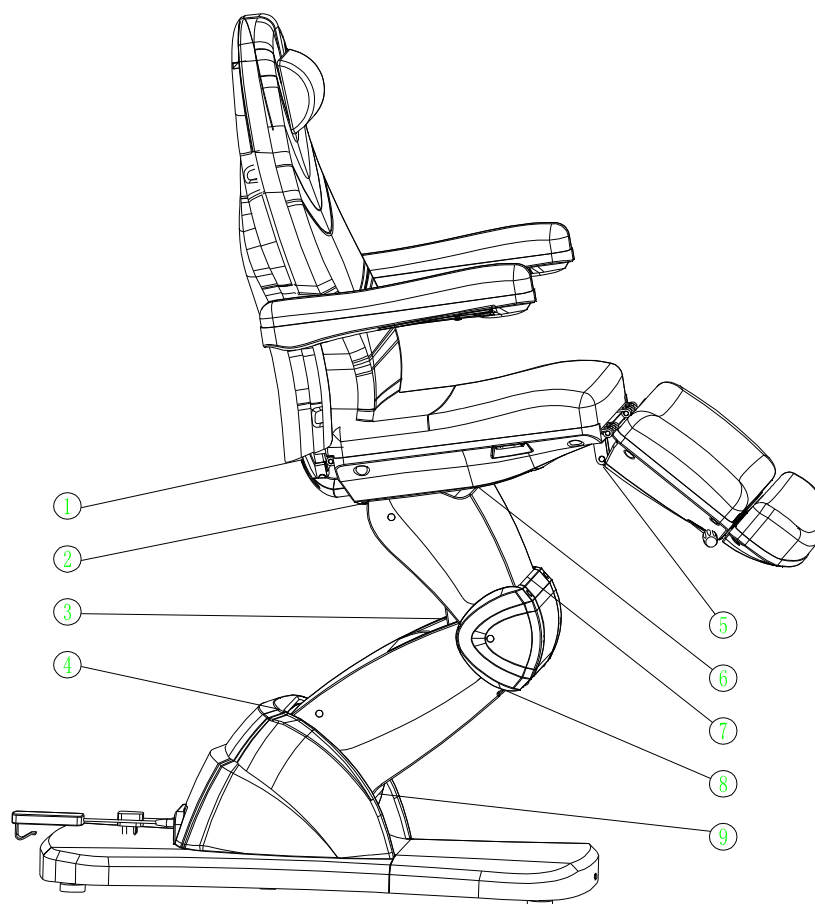

4

Avvertenza

- Durante il funzionamento del Lettino Beauty, non dovrebbe essere posizionato nulla che vada a toccare il lettino durante il suo movimento verso il raggiungimento della posizione completamente stesa.
- Durante la regolazione del livello di altezza del Lettino Beauty, premere il pulsante di controllo fino alla posizione corretta.
- Durante la regolazione della posizione del poggiatesta si prega di assicurarsi che la posizione venga bloccata a seguito della regolazione.
- Durante il ricambio di parti, si prega di assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
- Durante la pulizia dello strumento si prega di assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
- Per pulire e rimuovere polvere e macchie dalle superfici in pelle e stampe in plastica, dovrebbe essere utilizzato un detergente neutro.
- Il presente strumento può essere manipolato da estetisti professionisti.


5

Composizione del Lettino Elettrico Beauty

Il Lettino Beauty è formato da: sistema di comando, motore, seduta, parti metalliche, forme di

plastica, parti in plastica, parti in pelle. Il sistema di comando ha funzioni quali: connessione al telecomando, connessione alla pedaliera, connessione ai 3 motori, connessione al sistema di riscaldamento.

Il comando dell'angolo dello schienale, il comando dell'angolo della seduta, il comando dell'altezza del lettino ed il comando del supporto per i piedi del presente strumento sono tutti integrati con mostrato nel grafico di seguito:

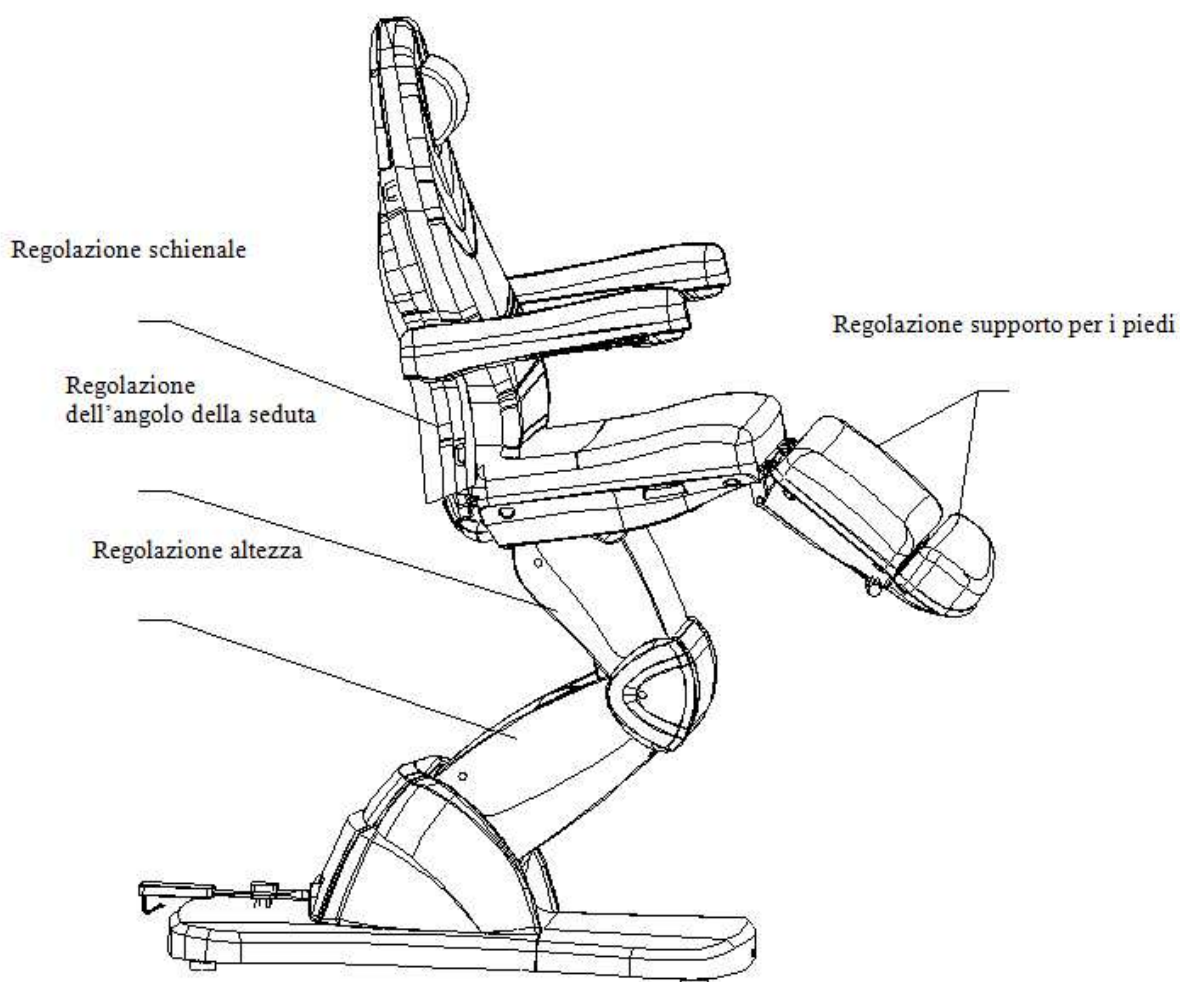

6

Area di Applicazione

Il presente lettino è adatto a trattamenti medici, trattamenti estetici, manicure e massaggi.

7

Installazione

1. Posizionare tale strumento secondo la disposizione generale, luminosità e impiego della stanza o del salone, mettere il presente strumento in un'area pulita, asciutta e con ricircolo d'aria cosicché possa funzionare in condizioni di lavoro adeguate.


2. Controllo al disimballo: durante il disimballo, controllare che l'intera macchina non abbia danni e controllare accuratamente per vedere che tutte le parti e gli accessori siano in buone condizioni. In dubbio, si prega di contattare il responsabile vendite di zona o di contattare la nostra azienda.
3. Montaggio lettino: per prima cosa montare il lettino nell'area desiderata. Non vi è alcun bisogno di installare il fissaggio della base del lettino in quanto già installata, tuttavia il lettino deve essere posizionato su di una superficie piana e solida per evitare incidenti. In caso il Lettino Beauty possa essere ruotato o è inclinato in una determinata direzione, una chiave per dadi esagonale può essere utilizzata per aggiustare i 4 piedi di plastica M10 x 30 e il dado M10 al fine di posizionare il lettino in equilibrio. Ci dovrebbe essere un contatto massimo tra il pavimento e i piedi di plastica per raggiungere un equilibrio stabile.
4. Connessione del pannello di controllo e alimentazione: Connettere Alimentazione, Telecomando e Pedaliera come nel grafico di seguito. Alimentazione a corrente alternata 100-130/220-240V, 50/60H.



8

Pannello di Istruzioni e Funzionamento

8.1 Pannello di Istruzioni e Funzionamento del Telecomando

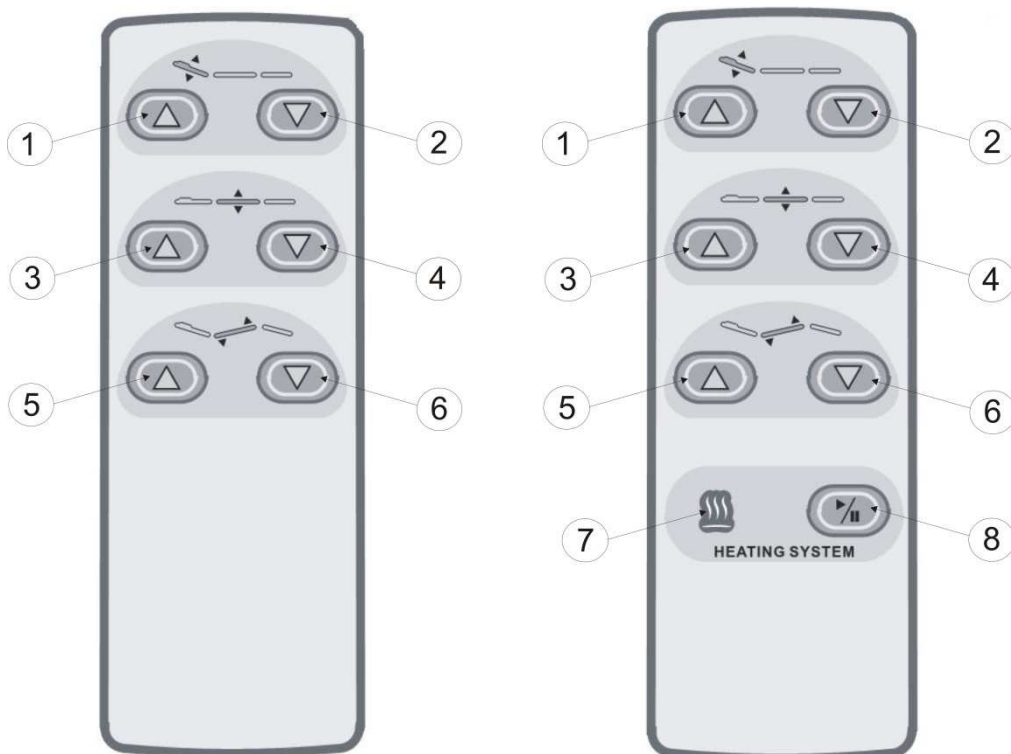


Telecomando (senza sistema di riscaldamento)

Telecomando (con sistema di riscaldamento)

Numero	Funzione	Descrizione
①	Sollevamento posteriore	Lo schienale verrà sollevato lentamente tenendo premuto il pulsante
②	Abbassamento posteriore	Lo schienale verrà abbassato lentamente tenendo premuto il pulsante
③	Sollevamento del Lettino	L'intero Lettino Beauty verrà sollevato lentamente tenendo premuto il pulsante
④	Abbassamento del Lettino	L'intero Lettino Beauty verrà abbassato lentamente tenendo premuto il pulsante
⑤	Sollevamento seduta	La seduta verrà sollevata e l'angolo allargato lentamente tenendo premuto il pulsante
⑥	Abbassamento Seduta	La seduta verrà abbassata e l'angolo ristretto lentamente tenendo premuto il pulsante.
⑦	Pulsante mostra riscaldamento	Durante l'attivazione del riscaldamento, la luce è accesa, mentre quando il riscaldamento viene interrotto, la luce è spenta.
⑧	Pulsante accensione Sistema di riscaldamento	Il riscaldamento verrà attivato su schienale, seduta, e area piedi del Lettino Beauty premendo il pulsante, e disattivato premendo nuovamente il pulsante.

8.2 Pannello di Istruzioni e Funzionamento della Pedaliera

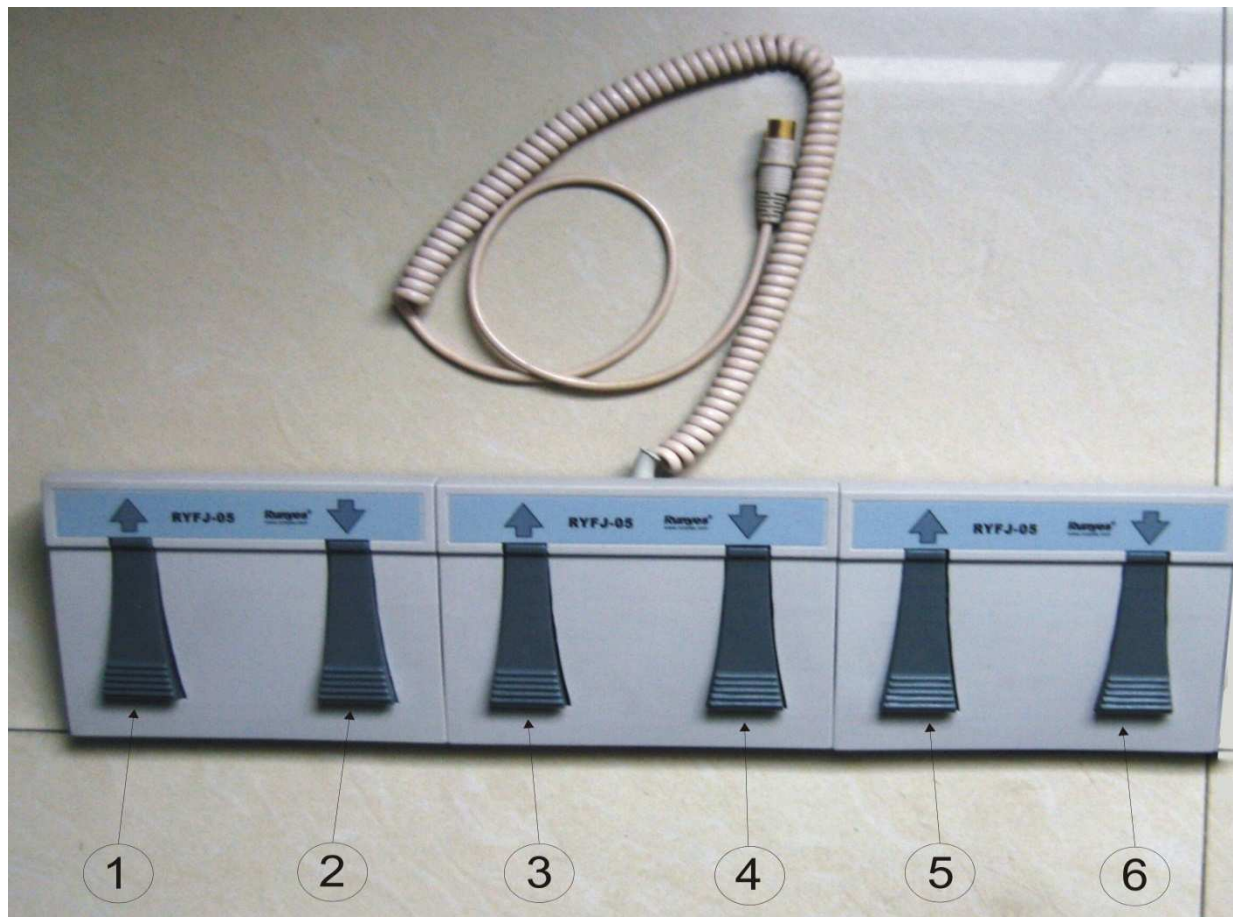


Pedaliera (senza Sistema di Riscaldamento)

Numero	Funzione	Descrizione
①	Sollevamento posteriore	Lo schienale verrà sollevato lentamente tenendo premuto il pedale
②	Abbassamento posteriore	Lo schienale verrà abbassato lentamente tenendo premuto il pedale
③	Sollevamento del Lettino	L'intero Lettino Beauty verrà sollevato lentamente tenendo premuto il pedale
④	Abbassamento del Lettino	L'intero Lettino Beauty verrà abbassato lentamente tenendo premuto il pedale
⑤	Sollevamento seduta	La seduta verrà sollevata e l'angolo allargato lentamente tenendo premuto il pedale
⑥	Abbassamento Seduta	La seduta verrà abbassata e l'angolo ristretto lentamente tenendo premuto il pedale

9

Dati Tecnici

- Sicurezza: Certificati VDE e UL
- Dimensione e Peso
 - Dimensione dell'Area: 1960 mm (L) × 560 mm (l) × 590 mm (H) (tolleranza: ±2%)
 - Posizione più alta: 1000±10mm
 - Posizione più bassa: 590±10mm
 - Dimensioni imballaggio: 1720 mm (L) × 620 mm (l) × 720 mm (H)
 - Peso Netto: 86 kg
 - Peso Lordo: 100 kg
- Ambiente di Lavoro
 - Alimentazione: AC 100-130V/220-240V, 50/60Hz
- Parametro
 - Regolazione angolo schienale: 0°~+85°(tolleranza: ±10%)
 - Regolazione angolo seduta: 0°~ +10°±2°
 - Regolazione angolo piedi: -90°~0°(tolleranza: ±10%)
 - Regolazione lunghezza piedi: 150mm
 - Peso Massimo Sollevabile: 180 kg

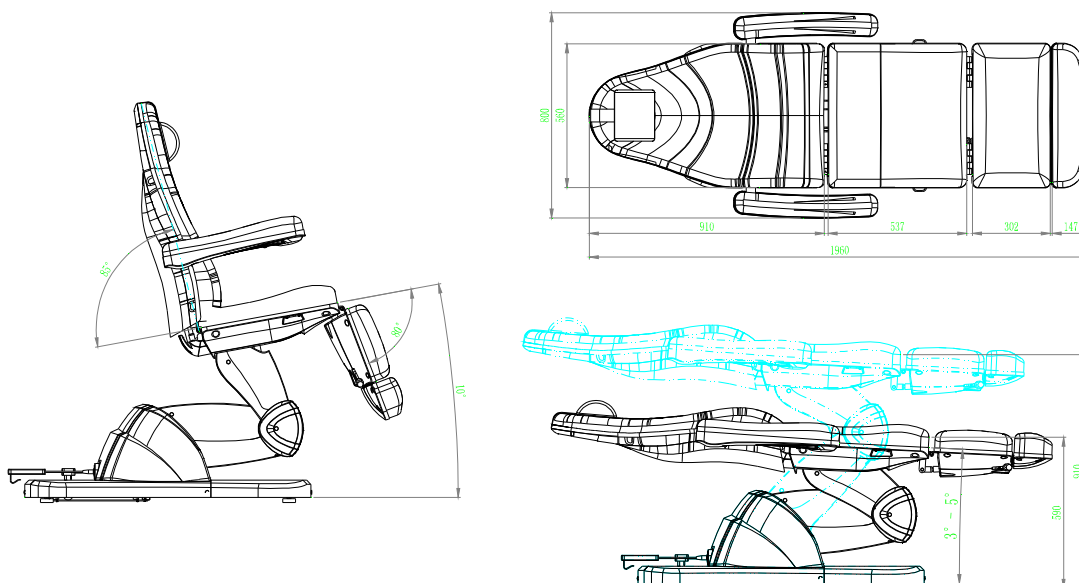


10

Manutenzione

Utilizzare un detergente neutro per pulire la superficie di pelle e rimuovere polvere e macchie dalle forme di plastica per evitare l'invecchiamento precoce della pelle e delle forme in plastica.

11

Layout connessione circuiteria

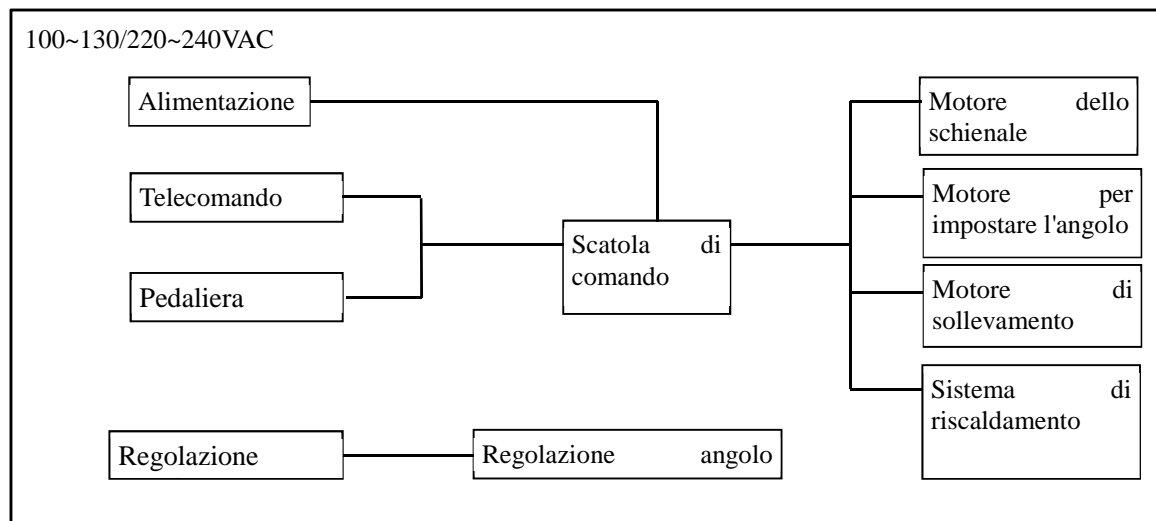

12

Soluzioni ai malfunzionamenti

Malfunzionamento	Motivo	Soluzione
Non si alza o non si abbassa	1、 Il motore è rotto 2、 Problema della scatola di comando 3、 Problema del telecomando 4、 Problema della connessione alimentazione	1、 Sostituire il motore 2、 Sostituire il sistema di comando programmato 3、 Sostituire il telecomando
Rumore	1、 Mancanza di lubrificazione sul supporto 2、 Mancanza di lubrificazione sul punto di rotazione (quali cerniera e cover POM) 3、 Problema del motore	1、 Aggiungere lubrificazione 2、 Sostituire il motore



INDICE DEI SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Conservare lontano da luce solare
	Conservare in luogo asciutto
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42 e ss.mm.ii.
	Smaltire il dispositivo in conformità alla direttiva 2012/19/EU
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.