


POLTRONA ELETTRICA MULTIUSO

Manuale d'uso

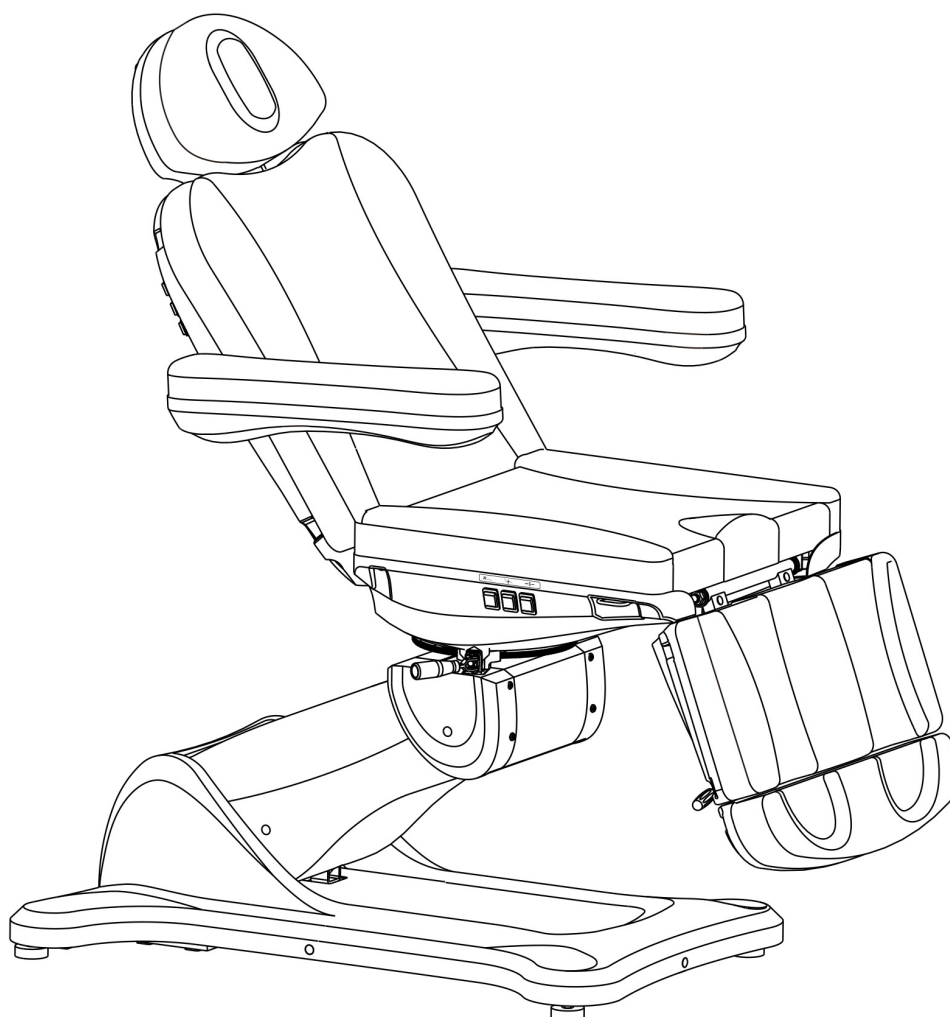

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF 28045




Fabbricante - Manufacturer:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
Made in China



1. STRUTTURA

La poltrona elettrica è costituita da: scatola di comando dei tre motori, motori, minuteria di fissaggio, parti in plastica e in pelle. Il dispositivo di comando manuale e i tre motori sono collegati tramite la scatola di comando. La poltrona elettrica è costituito da uno schienale ad inclinazione regolabile, da un sedile ad angolazione impostabile e dagli organi di regolazione sull'asse verticale. La poltrona è una struttura monolitica integrata (vedere l'immagine qui sotto)

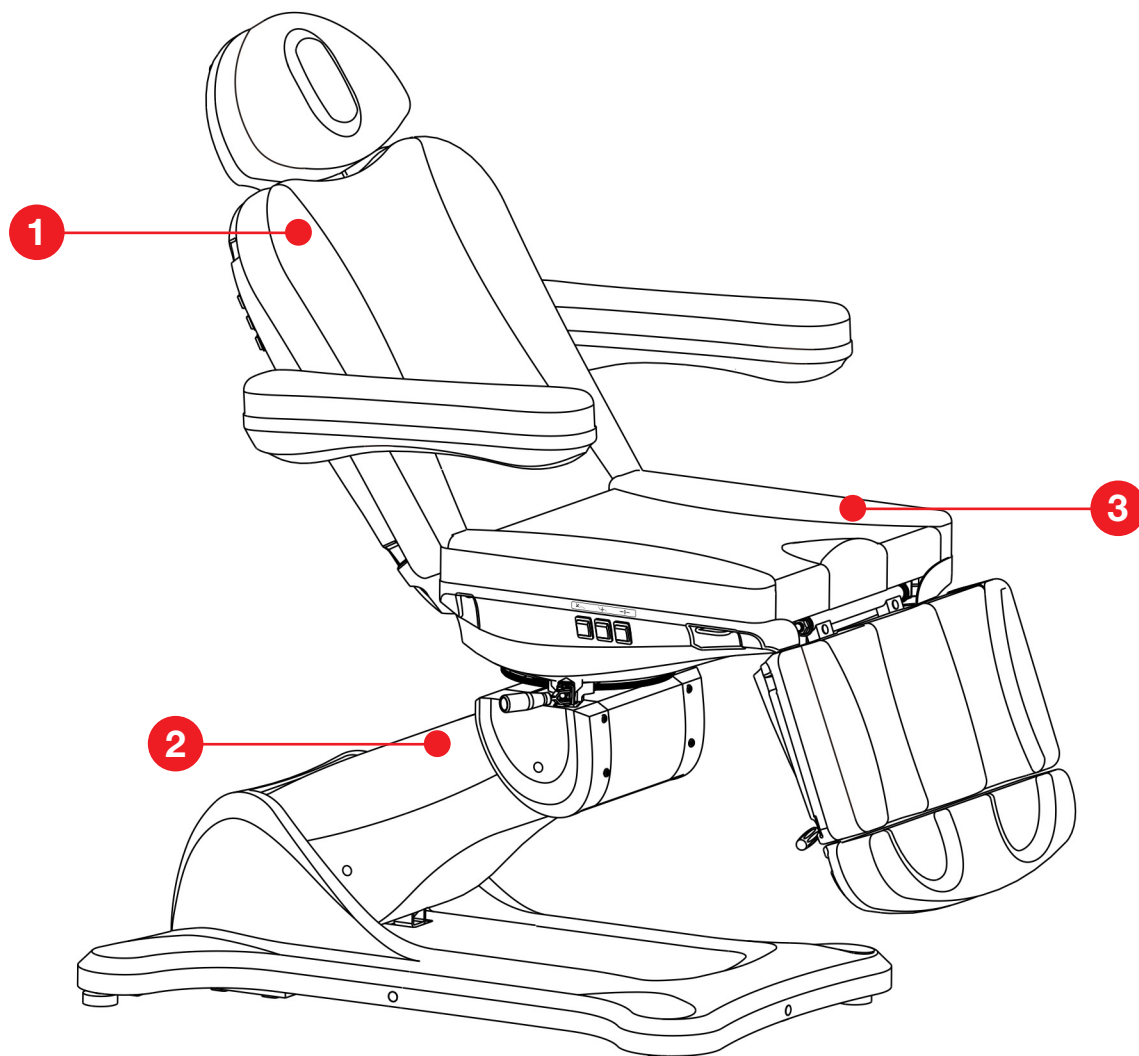

1. Schienale ad inclinazione regolabile.
2. Organi di regolazione sull'asse verticale.
3. Sedile ad angolazione impostabile.


2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Adatto a trattamenti medici, estetici e massaggi.


3. INSTALLAZIONE

- 1.** Valutare l'area complessiva, l'illuminazione e considerare ogni aspetto specifico del locale per determinare il luogo di installazione. La poltrona deve essere posizionata in un ambiente di lavoro sano, pulito, asciutto e aerato.
- 2.** Ispezione all'apertura. Aprire l'imballaggio esterno verificando che la macchina si trovi in buono stato. Per qualsiasi quesito, si prega di contattare immediatamente il distributore oppure direttamente l'azienda.
- 3.** Installazione. Prima di tutto, posizionare la poltrona nel luogo scelto. Non è necessario applicare le viti di ancoraggio dal momento che la stabilità è stata presa in considerazione in fase di progettazione; tuttavia il pavimento deve essere piano e solido per prevenire incidenti. Se la poltrona subisce rotazioni o inclinazioni provocate da un piano di appoggio non uniforme, è possibile utilizzare una chiave per regolare i piedini in plastica M10X30 e il dado M10 fino a ottenere la stabilità necessaria. Affinché l'intera poltrona rimanga stabile, agire su tutti i punti di regolazione.
- 4.** Connessione del pannello di controllo e alimentazione. Osservare la seguente procedura per connettere l'alimentazione il comando manuale e il pedale.

Spine da sinistra a destra: spina di alimentazione, spina del comando manuale, spina del pedale.

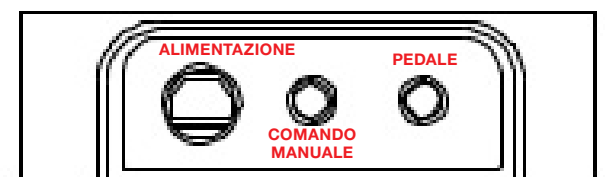


Vedere immagine

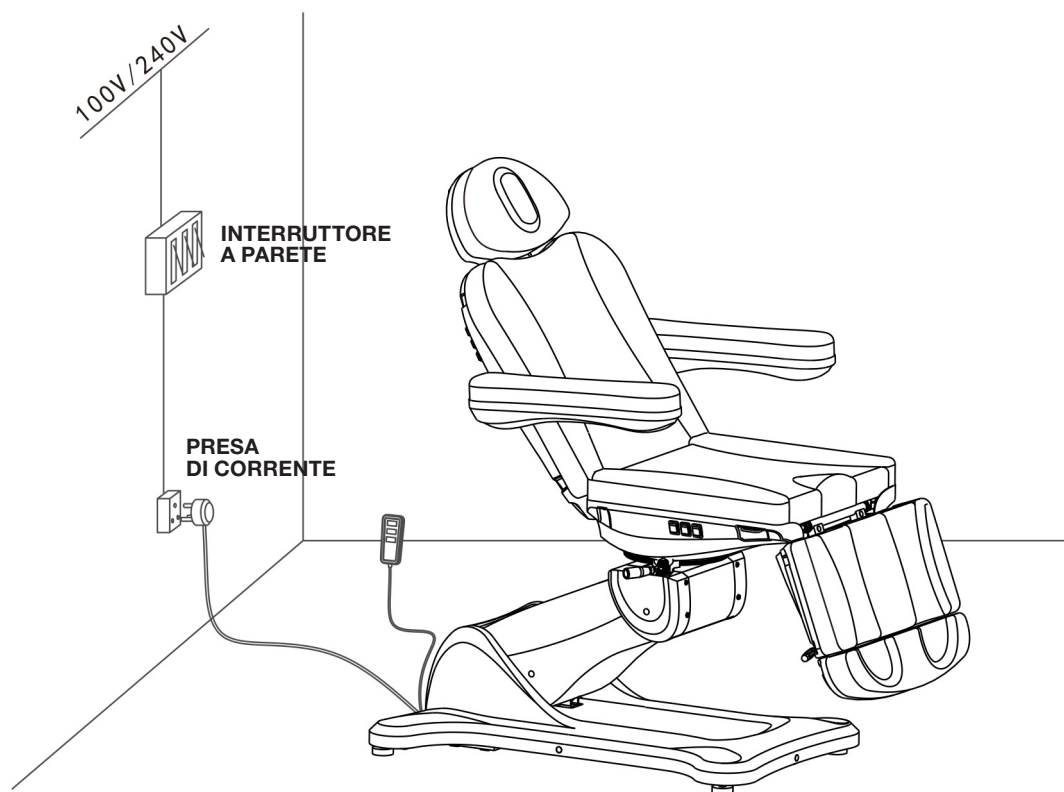

4. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO


1. Configurazione standard (interruttore a bilanciere)

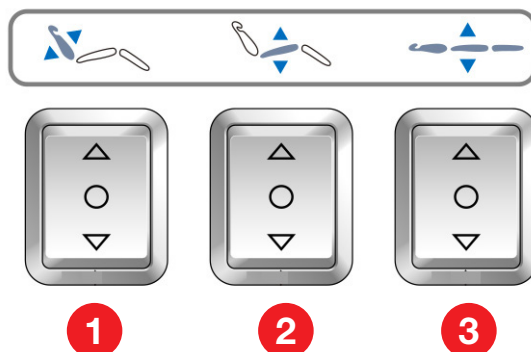

Istruzione	Utilizzo
1. Pulsante di inclinazione dello schienale	Premendo il pulsante lo schienale si alza e si abbassa proporzionalmente
2. Pulsante di regolazione dell'angolo del sedile	Premendo il pulsante, l'angolo del sedile aumenta o diminuisce proporzionalmente
3. Pulsante di regolazione sull'asse verticale	Premendo il pulsante, l'altezza del lettino aumenta o diminuisce proporzionalmente

5. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO


1. Opzione (comando manuale)

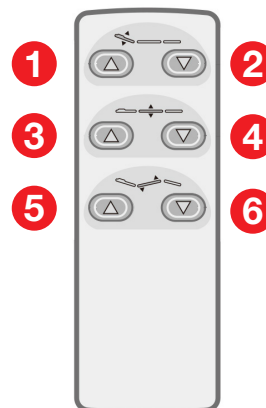

Istruzione	Utilizzo
1. Schienale SU	Premendo il pulsante lo schienale si alza proporzionalmente
2. Schienale GIÙ	Premendo il pulsante lo schienale si abbassa proporzionalmente
3. Poltrona SU	Premendo il pulsante, l'altezza aumenta proporzionalmente
4. Poltrona GIÙ	Premendo il pulsante, l'altezza diminuisce proporzionalmente
5. Angolazione +	Premendo il pulsante, l'angolo del sedile aumenta proporzionalmente
6. Angolazione -	Premendo il pulsante, l'angolo del sedile diminuisce proporzionalmente

6. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO

2. Configurazione standard (comando a pedale)

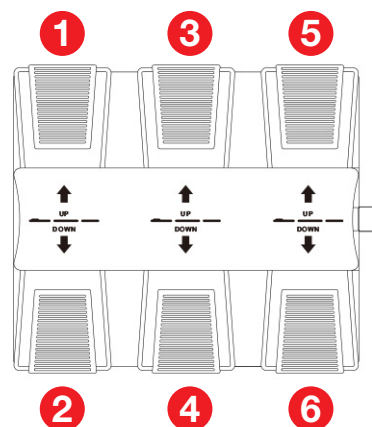

Istruzione	Utilizzo
1. Schienale SU	Premendo il pedale, lo schienale si alza gradualmente
2. Schienale GIÙ	Premendo il pedale, lo schienale si abbassa gradualmente
3. Poltrona SU	Premendo il pedale, l'altezza aumenta gradualmente
4. Poltrona GIÙ	Premendo il pedale, l'altezza diminuisce gradualmente
5. Angolazione +	Premendo il pedale, l'angolo del sedile aumenta gradualmente
6. Angolazione -	Premendo il pedale, l'angolo del sedile diminuisce gradualmente

7. MANUTENZIONE

Al termine di ciascun trattamento, usare un detergente neutro per asportare la polvere e le macchie dalle superfici in pelle e plastica per prevenirne l'invecchiamento.

Dimensioni del prodotto	1860(L) x860(W) x580(880) (H) mm
Dimensioni imballaggio	1360x820x640mm
Altezza massima	880±10mm
Altezza minima	580±10mm
Peso netto	79 kg
Peso lordo	92 kg
Tensione	CA 220~240 V, 50 Hz/ 60 Hz
Campo di regolazione dello schienale	0° ~ + 80°
Campo di regolazione del sedile	0° ~ + 10°
Angolo di rotazione del sedile	- 120°~ + 120°
Campo di regolazione del poggiapiedi	- 90°~ 0°
Corsa di estensione del poggiapiedi	150 mm
Limite di portata	170 kg

