

Articolo

241



Categoria commerciale

ORTESI PER IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 48%
POLIESTERE 34%
ELASTAN 18%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA POLSO CM	WRIST CIRCUMFERENCE	COLORE / COLOUR
S	fino a cm 17	till cm 17	DESTRO / SINISTRO RIGHT / LEFT
M	da cm 17 a cm 19	from cm 17 till cm 19	
L	oltre 19 cm	over 19 cm	

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare prima il guantino in tessuto, aprire i cinghietti del guscio rigido, indossare il guscio e richiudere il cinghietto.

Indicazioni

» Rizoartrosi
» Tendiniti e distorsioni del pollice
» Immobilizzazione pollice

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.