

Articolo

444



Categoria commerciale

CAVIGLIERE

Colore di vendita

AZZURRO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 58%
COTONE 26%
ELASTAM 16%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
1°	19-21	3°	24-25	5°	28-29
2°	22-23	4°	26-27		

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Indossare come un normale calzino. Applicare la benda elastica nella parte superiore del calzino, avvolgere la benda ivrociandola sotto la pianta del piede bloccandola su se stessa con la parte velcrabile.



Indicazioni

Media instabilità della caviglia.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.