

Articolo

445



Categoria commerciale

CAVIGLIERE

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

NYLON	43%
POLIESTERE	39%
GOMMA	10%
ELASTAN	8%
	100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

La cavigliera è composta da 3 parti.-2 tiranti
 -Una parte tubolare che si deve infilare nel piede
 -Una parte apribile da posizionare attorno al polpaccio subito sopra la caviglia. Aprire completamente i 2 tiranti e distenderli.
 Infilare il piede nella parte tubolare non apribile. Una volta indossata, la parte tubolare deve trovarsi prima del tallone e con i tiranti aperti sotto la pianta del piede.
 Aprire completamente la parte superiore della cavigliera e farla aderire attorno alla tibia. Richiudere
 Prendere i 1 tiranti che si trovano sotto la pianta del piede e farli aderire alla parte superiore della cavigliera calibrando la tensione. I 2 tiranti devono passare sotto la pianta del piede ed essere posizionati a "X" sulla parte superiore della caviglia

Indicazioni

Consigliate in caso di strappi, distorsioni, instabilità dell'articolazione e nella pratica sportiva, a scopo preventivo nel caso di sollecitazioni continue.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.