

Articolo

471



Categoria commerciale

CAVIGLIERE

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIESTERE

NYLON

FOAM



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



Lavaggio

Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Lavare con un panno inumidito e sapone neutro. Evitare l'immersione diretta in acqua, fare asciugare lontano da fonti di calore.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>1) Aprire completamente i due cinghietti sulla tibia e posizionare i cuscinetti all'interno della struttura. La parte più stretta dell'imbottitura deve combaciare con la parte più stretta dei cuscinetti di plastica. 2) Regolare la larghezza del tallone tramite i due cinghietti posti alla base dei gusci. L'aregolazione avviene facendoli scorrere nelle due fessure inferiori dei gusci. 3) Fissare i due gusci contro la caviglia chiudendo per primo il cinghietto inferiore della tibia senza stringere eccessivamente. 4) Indossare la scarpa. 5) Chiudere il cinghietto superiore della tibia. 6) Controllare la tensione ed eventualmente tenderli nuovamente. Si deve sentire una giusta aderenza e sostegno, senza però creare ostacoli alla circolazione sanguigna. L'aderenza della caviglia, a seguito della diminuzione del gonfiore, potrebbe variare. In questo caso provvedere a regolare nuovamente i cinghietti.</p>	<p>Instabilità della caviglia. Traumi distorsivi. Riabilitazione post-operatoria.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>