

LINEA

Articolo

487

Categoria commerciale

GOMITIERA CON POWER BAND TAPING INTEGRATO

Colore di vendita

NERO

Taping GRIGIO

Comp. Tessile

Nylon

85%

Spandex

15%

Silicone

100%



Taglie di vendita

	S	M	L	XL
	23/28	25/30	27/32	29/34

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Asciugare disteso	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Scegliere la taglia appropriata (vedi istruzioni riportate sulla confezione).

Indossare la gomitiere: il gomito dovrà essere al centro del disegno circolare (vedi immagine).

Far aderire bene la gomitiere agendo sui bordi superiore e inferiore.

Indicazioni

Particolarmente indicata nelle attività sportive in fase di prevenzione o recupero dopo infortuni, nel post-operatorio.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per modo e tempo di utilizzo.

La gomitiere non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto della gomitiere. Non modificare la struttura della gomitiere per non alterarne la funzionalità.

I materiali utilizzati escludono nella generalità dei casi a noi noti l'insorgenza di effetti collaterali.

Nel caso dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo.