

LINEA

Articolo

489

Categoria commerciale

CAVIGLIERA CON POWER BAND TAPING INTEGRATO

Colore di vendita

NERO

Taping GRIGIO

Comp. Tessile

Nylon

85%

Spandex

15%

Silicone

100%



Taglie di vendita

	S	M	L	SINISTRO/ DESTRO
	16/20	19/23	21/27	LEFT / RIGHT

**ATTENZIONE!
ATTENTION!**

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Asciugare disteso	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Scegliere la taglia appropriata (vedi istruzioni riportate sulla confezione).
ATTENZIONE: scegliere tra la versione destra o sinistra.
 Aprire lo strap ed indossare la cavigliera. La parte in colore nero in doppio tessuto deve rimanere sotto la pianta del piede.
 Richiudere lo strap
 Far aderire bene la cavigliera agendo sul bordo superiore e inferiore.

Indicazioni

Particolarmente indicata nelle attività sportive in fase di prevenzione o recupero dopo infortuni, nel post-operatorio.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per modo e tempo di utilizzo.
 La cavigliera non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto della cavigliera. Non modificare la struttura della cavigliera per non alterarne la funzionalità.
 I materiali utilizzati escludono nella generalità dei casi a noi noti l'insorgenza di effetti collaterali.
 Nel caso dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo.