



LINEA

orione®

Articolo

9292



Categoria commerciale

COLLARI CERVICALI

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

FINTA PELLE

POLIESTERE

COTONE



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR
	S	30-35	L	40-45
	M	35-40	XL	45-oltre

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

COLLARE CERVICALE RIGIDO CON MENTONIERA

Indicazioni

Traumatismi cervicali di media gravità. Cifosi cervicali. Nevralgie cervicobrachiali.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.