

Articolo **9797**



Categoria commerciale **RADDRIZZASPALLE**

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

COTONE 40%  
 NYLON 30%  
 ELASTAN 15%  
 POLIAMMIDE 15%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	80-90	L	100-110
M	90-100	XL	110-120

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>1) Posizionare il dispositivo sulla schiena, 2) far passare i tiranti sotto le ascelle, 3) incrociarli nel centro schiena, 4) agganciarle tramite il velcro sul davanti. Agire sui tiranti per la corretta regolazione del raddrizzaspalle.</p>	<p>Aiuta a mantenere una corretta postura del dorso e delle spalle.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>