



MANUALE D'USO

DUO PRO



CE
0197

**EGREGIO CLIENTE LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA NOSTRA PIU' COMPLETA DISPONIBILITA' PER
QUALSIASI AIUTO O SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE BISOGNO.**

Prodotto da: SAVIA L.t.d. - 2nd Industrial District, Feng Huang Village (Shenzen) - Made in PRC - sales@tyece.com

Importato e distribuito da: Domino s.r.l. - via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè -TV -ITALY - Tel. (+39) 0438.7933 - info@globusitalia.com

L'apparecchiatura è stata costruita in conformità alle norme tecniche vigenti, ed è stata sottoposta a certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Il produttore declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI **DUO PRO**

SPORT

N°	NOME PROGRAMMA	TIME min.	Intensità	Posizionamento elettrodi
1	Capillarizzazione	25	Moderata	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
2	Riscaldamento	10	Moderata	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
3	Recupero attivo post gara/allenamento	20	Moderata	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
4	Forza Massimale	20	Massima	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
5	Forza Resistente	25	Da moderata a forte	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
6	Forza Esplosiva	20	Massima	Da 10 a 27 tranne 23 e 24
7	Reattività	15	Massima	Da 10 a 27 tranne 23 e 24

FITNESS

8	Drenaggio braccia (Braccia gonfie)	30	Moderata	10,11,12,13,14,15
9	Drenaggio cosce	25	Moderata	16,17,18,19
10	Drenaggio fianchi	25	Moderata	20,21
11	Drenaggio fascia addominale	25	Moderata	25,26
12	Drenaggio glutei	25	Moderata	22
13	Lipolisi anticellulite cosce	30	Moderata	16,17,18,19
14	Lipolisi anticellulite glutei e fianchi	30	Moderata	20,21,22
15	Lipolisi anticellulite fascia addominale	30	Moderata	25,26
16	Lipolisi anticellulite arti superiori	30	Moderata	10,11,12,13,14,15
17	Rassodamento cosce, glutei e fianchi	30	Moderata	16,17,18,19,20,21,22
18	Rassodamento fascia addominale	30	Moderata	25,26
19	Rassodamento arti superiori	30	Moderata	10,11,12,13,14,15
20	Tonificazione arti superiori	25	Da moderata a forte	10,11,12,13,14,15
21	Tonificazione cosce, glutei e fianchi	25	Da moderata a forte	16,17,18,19,20,21,22
22	Tonificazione fascia addominale	25	Da moderata a forte	25,26
23	Modellamento arti superiori	20	Da moderata a forte	10,11,12,13,14,15
24	Modellamento cosce, glutei e fianchi	20	Da moderata a forte	16,17,18,19,20,21,22
25	Modellamento fascia addominale	20	Da moderata a forte	25,26
26	Tonificazione Seno	15	Moderata	24
27	Bellezza viso	15	Bassa	23

REHAB

28	Atrofia muscolare arti sup.	15	Moderata	10,11,12,13,14
29	Atrofia muscolare arti inf.	25	Moderata	16,17,18,19
30	Tens antalgico	30	Senza contrazione	Tutte tranne 23,24
31	Tens endorfinico	30	Non dolorosa	Tutte tranne 23,24
32	Tens antinfiammatorio (dolori articolari)	30	Non dolorosa	Tutte tranne 23,24
33	Cervicali	25	Non dolorosa	5
34	Lombosciatalgia	30	Non dolorosa	2,4
35	Contratture muscolari	30	Non dolorosa	Tutte tranne 23,24

Legenda:

BASSA = Contrazione appena percettibile

MODERATA = Contrazione assolutamente sopportabile e gradevole. Movimento muscolare visibile

Da MODERATA a FORTE = Contrazioni evidenti ma sopportabili.

MASSIMA = Contrazioni massime. Sopportabili ma senza dolore.

SPORT

Capillarizzazione: Aumenta l'apporto sanguigno al muscolo e migliora le qualità di resistenza e recupero. Questo aumento della portata arteriosa, permette di mantenere attiva la rete capillare primaria e secondaria al fine di migliorare il sistema di ossigenazione dei tessuti. Ciò consente un ritardo dell'affaticamento durante un lavoro molto intenso. I programmi di capillarizzazione sono consigliati specialmente per gli sport che richiedono forza resistente e endurance.

Riscaldamento: Aumento della temperatura muscolare per una migliore preparazione all'allenamento. Aumenta l'apporto di sangue e il metabolismo nel muscolo. Consigliato prima di un allenamento fisico o di una gara.

Decontrattante: Consente un rilassamento efficace del muscolo grazie a delle contrazioni confortevoli che aumentano la circolazione.

Forza Massimale: Migliora la capacità di forza massimale e aumenta la massa muscolare. Consente l'allenamento con un carico massimo con un rischio di traumi inferiore rispetto all'allenamento classico. Utile anche nel primo periodo di preparazione in quanto allena la muscolatura a ricevere sollecitazioni importanti.

Forza Resistente: Migliora la capacità di esprimere un livello di forza elevato per un periodo prolungato e aumenta la capacità di resistere all'accumulo di tossine e quindi ritarda l'affaticamento muscolare. Il programma consiste nel produrre un alto numero di lunghe contrazioni, alternate ad un breve riposo attivo.

Forza Esplosiva: Il programma Forza esplosiva aumenta la capacità di raggiungere rapidamente un' espressione di forza massimale. Consigliato in tutti gli sport caratterizzati da un' espressione di forza massimale a carico naturale, come ad esempio la corsa veloce, gli sport con la palla, lo sci alpino.

Reattività: Questo programma è stato studiato per ottenere incrementi della velocità di contrazione. Le contrazioni muscolari sono brevi, molto intense ed estremamente veloci.

FITNESS e BEAUTY

Drenaggio: La stimolazione produce un effetto di massaggio muscolare che parte dall'estremità degli arti e si estende in profondità. L'azione di massaggio attiva i sistemi venosi e linfatici grazie ad un effetto meccanico. Lo scopo consiste nel migliorare la circolazione e nell'incentivare l'eliminazione delle tossine.

Lipolisi anticellulite: La bassa frequenza di questo programma ha un effetto positivo sul metabolismo, aumenta l'eliminazione delle tossine e dei liquidi indesiderati. Si tratta di un metodo per rimodellare le zone critiche, modificando il metabolismo degli adipociti. Aumenta la capacità di migliorare ed eliminare l'effetto "buccia d'arancia" della pelle.

Rassodamento: Il programma è indicato a soggetti sedentari con muscolatura flaccida che richiede la riattivazione del tono muscolare. Prepara la muscolatura a stimolazioni più intense. Può essere eseguito ogni giorno.

Tonificazione: Il programma di tonificazione consente di sviluppare e mantenere il tono muscolare. Questo tipo di trattamento può essere associato ad attività aerobica ed è rivolto specialmente a coloro che, attenti alla propria condizione fisica, desiderano un'integrazione al proprio allenamento regolare.

Modellamento: Il programma di modellamento è l'ultimo stadio prettamente estetico ed è ideale per coloro che desiderano definire meglio la muscolatura di per sé già tonica. Il programma è adatto a coloro che desiderano ottenere definizione muscolare in zone in cui i movimenti tradizionali degli esercizi di sviluppo muscolare sono insufficienti.

Bellezza viso: Questo programma è indicato per mantenere l'elasticità della pelle in quanto riattiva la circolazione locale apportando nuovo nutrimento ai tessuti.

REHAB e SALUTE

Atrofia muscolare: Ripresa dell'attività fisica dopo un periodo di interruzione. Dopo un trauma o altra interruzione dell'attività fisica, spesso i muscoli perdono forza e massa muscolare. E' importante ristabilire la normale capacità muscolare non appena possibile. Il programma Atrofia muscolare dà la possibilità di allenare i muscoli specifici interessati.

Tens antalgico, Tens antinfiammatorio: Consente l'alleviamento del dolore e un rilassamento efficace del muscolo. Il programma TENS utilizza i meccanismi propri del sistema nervoso per lenire sia il dolore acuto che cronico. Gli impulsi vengono propagati attraverso i nervi per bloccare le vie di propagazione del dolore. Il rilassamento muscolare aumenta la circolazione e aiuta i muscoli a rilassarsi. Può essere utilizzato in qualsiasi occasione in cui si necessita sia di alleviare il dolore che di rilassare il muscolo. Attenzione! I programmi TENS alleviano il dolore ma non ne eliminano la causa. Se il dolore persiste, ricorrere a consulto medico!

Tens endorfinico: Corrente antalgica di tipo endorfinico a bassa frequenza. L'effetto indotto avrà un'azione ritardata ma prolungata nell'arco della giornata. Può essere eseguito giornalmente e alternato agli altri programmi TENS.

Cervicali: Corrente di tipo TENS Burst endorfinico. Permette di ottenere un effetto di sollievo di lunga durata grazie ad un efficace rilassamento della zona cervicale. Il trattamento può essere eseguito giornalmente.

Lombosciatalgia: Corrente antalgica di tipo TENS. Effetto anti-infiammatorio. Si possono associare trattamenti per il rinforzo dei muscoli paravertebrali lombari per stabilizzare le vertebre.

Contratture muscolari: Consente un efficace rilassamento del muscolo grazie alle onfortevoli contrazioni che aumentano la circolazione. Questo programma può essere utilizzato ogni qualvolta si necessita di rilassamento muscolare.

Sommario	
- Accessori	2
- Precauzioni di utilizzo	3
- Caratteristiche tecniche dell'apparecchio palmare	5
- Smaltimento degli elettrodi e delle pile	
- Descrizione dell'apparecchio palmare	6
- Descrizione del display palmare	7
- Guida per un facile utilizzo del palmare	8
- Primo utilizzo	
- Mettere in pausa un programma	
- Funzioni automatiche	
- Auto spegnimento	
- Rilevamento contatto elettrico	
- Rilevamento di batteria scarica	
- Funzione di memoria	
- Intensità di stimolazione	
- Funzioni speciali	
- Blocco dei tasti	
- Inserimento delle batterie	10
- Connessione dei cavi	10
- Applicazione degli elettrodi	10
- Domande ricorrenti	11
- Condizioni di garanzia	12
- Posizionamento elettrodi	13

Dotazione

- Elettrostimolatore palmare
- Borsa per il trasporto
- 2 cavi di collegamento
- Busta elettrodi 45 X 45 mm.
- Busta elettrodi 45 X 90 mm.
- 3 Batterie stilo 1,5 V AAA
- Manuale

Accessori non in dotazione (a pagamento)

- Penna ricerca punti motori
- Kit Splitter (2 connettori + 2 cavi di collegamento) (4 canali - 8 elettrodi)
- Fasce gambe
- Elettrodi viso
- Kit cavetti sdoppiatori ad Y
- Gel

L'apparecchio per elettrostimolazione viene fornito completo di cavi ed elettrodi per l'uso: pertanto, una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto.

Controllare a vista l'integrità dell'apparecchio e degli elettrodi.

Elettrodi: Gli elettrodi in dotazione sono ad uso per un solo paziente, autoadesivi, pregellati con cavetto femmina. Sono marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/ CEE dispositivi medici.

Tutte le informazioni fornite possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

I marchi indicano che l'apparecchio è a norma CE medicale di tipo BF.

Per la presenza di programmi di stimolazione di tipo clinico, l'apparecchio è un dispositivo medico. Pertanto è certificato dall'Organismo Notificato (vedi copertina) ai sensi della direttiva europea 93/42/CEE sui dispositivi medici.

La certificazione ricopre le applicazioni cliniche.

SIMBOLI



Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive sugli apparecchi medici (93/42/CEE). Il numero dell'ente notificato è 0197.



Questo simbolo significa "Attenzione, consultare le avvertenze"



Parti applicate BF



Il simbolo indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Conforme RoHS



Il CE0197 non si riferisce ai trattamenti non di tipo medicale.

Gli avvisi sonori e acustici sono conformi alla direttiva 60601-1-1



Questo simbolo significa “Attenzione, consultare i documenti”

Controindicazioni

- Stimolazione parte anteriore del collo (seno carotideo).
- Paziente portatore di pace maker.
- Malati di tumore (consultare il proprio oncologo).
- Stimolazione della regione cerebrale.
- Utilizzo su dolori di cui non è nota l'eziologia.
- Piaghe e patologie dermatologiche.
- Traumi acuti.
- Stimolazione su cicatrici recenti.
- Donne in gravidanza.
- Durante la guida di automezzi.
- E' assolutamente vietato l'uso dell'elettrostimolatore nella zona oculare e genitale.
- Utilizzo dell'elettrostimolatore in acqua (l'apparecchio non è protetto contro la penetrazione dei liquidi) e in ambienti con gas combustibili, vapori infiammabili o in camere con ossigeno.

E' inoltre opportuno ricorrere all'elettrostimolazione con cautela nel caso si soffra di fragilità capillare, in quanto una stimolazione eccessiva potrebbe portare alla rottura di un numero maggiore di capillari.
E' comunque sempre preferibile consultare il proprio medico prima di iniziare il trattamento.

Possibili effetti indesiderati

Casi isolati di irritazione cutanea possono verificarsi in soggetti con particolare sensibilità epidermica. In caso di reazione allergica al gel degli elettrodi sospendere il trattamento e consultare un medico specialista. Se durante il trattamento dovessero comparire segni di tachicardia o di extrasistolia, è bene sospendere l'elettrostimolazione e sentire il parere del proprio medico.

Manutenzione e pulizia dell'apparecchio

- In caso di deterioramento dell'involucro dell'apparecchio, questo va sostituito e non più utilizzato.
- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di ripararlo in proprio. Non intervenire sulla macchina, non aprirla. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato
- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio e determinare malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- Tenere l'elettrostimolatore lontano da spruzzi d'acqua, sorgenti di calore, polvere, ambienti umidi e a diretta esposizione dei raggi solari e fonti di elevata emissione elettromagnetica. L'apparecchio deve essere utilizzato libero ed in aria non avvolto da stracci o quant'altro.
- Non pulire l'elettrostimolatore con diluenti, gasolio, cherosene, alcool o prodotti chimici. Per la pulizia è sufficiente un panno morbido leggermente inumidito sia per l'apparato che per i cavi.
- Dopo un lungo periodo di inutilizzo, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio e del pacco batterie (rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato).
- Il dispositivo quando in carica non va utilizzato.

- Si sconsiglia l'uso dell'apparecchio in concomitanza con altri apparati elettronici, in modo particolare con quelli che vengono impiegati per il sostentamento di funzioni vitali.

Conservazione ed uso degli elettrodi e dei cavi

Prima di applicare gli elettrodi sulla pelle si consiglia di pulire accuratamente la stessa.

Dopo aver usato gli elettrodi multiuso monopaziente e/o monouso questi devono essere conservati utilizzando la propria pellicola di plastica e riposti in un sacchetto di plastica pulito e chiuso. Evitare che gli elettrodi si tocchino o si sovrappongano fra loro. Una volta aperta la confezione, gli elettrodi possono essere utilizzati per 25-30 applicazioni.

Gli elettrodi vanno comunque sempre sostituiti nel caso in cui gli stessi non rimangano perfettamente aderenti e a contatto con la pelle. Nel caso di utilizzo con elettrodi non autoadesivi si consiglia di pulirne la superficie con acqua.

Assicurarsi della corretta pulizia dei cavi e degli elettrodi prima di ogni applicazione.

In caso di deterioramento dei cavi questi vanno sostituiti con ricambi originali e non più utilizzati. Utilizzare soltanto elettrodi forniti dalla casa.



Avvertenze

- L'uso dell'apparecchio è riservato esclusivamente a persone adulte in grado di intendere e volere.
- L'elettrostimolatore non deve essere utilizzato per fini diversi dalla neurostimolazione transcutanea.
- Gli apparecchi di neurostimolazione devono essere utilizzati seguendo le indicazioni e sotto stretto controllo medico o di un fisioterapista abilitato.
- L'elettrostimolatore deve essere utilizzato con gli elettrodi di neurostimolazione transcutanea idonei a quest'utilizzo.
- L'elettrostimolatore deve essere tenuto fuori della portata dei bambini.
- Gli apparecchi di monitoraggio ECG possono essere disturbati dalla corrente dell'elettrostimolatore.
- La corrente non deve essere applicata in modalità transtoracica poiché potrebbe causare aritmia cardiaca sovrapponendo la frequenza dell'elettrostimolatore a quella del cuore. (Non eseguire contemporaneamente il trattamento sui pettorali e sui dorsali).
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparecchi per terapia ad onde corte.
- Non utilizzare l'apparecchio senza aver prima consultato il medico qualora fossero presenti problemi di salute.



Destinazione d'uso

Studiare attentamente il manuale d'uso, per evitare operazioni d'installazione, uso e manutenzione non adeguate che potrebbero danneggiare il dispositivo, l'operatore o l'utilizzatore.

Gli elettrostimolatori sono studiati per poter essere utilizzati in ambiti operativi quali:

- ambiente domestico, ambulatoriale, fisioterapico, riabilitazione in genere, trattamenti del dolore in genere, qualunque tipo di elettrostimolazione sequenziale, in uso estetico e sportivo.

L'uso di tale apparecchio è consentito al paziente stesso (opportunamente informato delle metodologie usate dall'apparato), personale medico e paramedico.



Numero di canali:	2
Intensità:	100 I pp
Forma d'onda:	Impulso quadro, bifasico, simmetrico, compensato
Frequenza di lavoro:	1-120 Hz
Ampiezza d'impulso:	50-320 μ s
Alimentazione:	3 batterie stilo 1,5 V AAA del tipo LR03
Peso:	95 gr.
Classificazione:	Alimentazione interna, type BF
Certificazioni:	Certificato CE MDD (Medical Device Directive).
Temperatura di stoccaggio e di trasporto:	da -10°C a 45°C
Umidità relativa massima:	75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa
Condizioni di utilizzo	
Temperatura:	da 0°C a 40°C
Umidità relativa massima:	da 30% a 75%
Pressione atmosferica:	da 700 hPa a 1060 hPa

Produttore e fabbricante sono riportati in fondo copertina


Smaltimento degli elettrodi e delle pile

Non gettare le pile o gli elettrodi nel fuoco, ma disfarsene in base alle leggi sullo smaltimento di tali oggetti in vigore nel proprio paese.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



DESCRIZIONE DEL DISPLAY

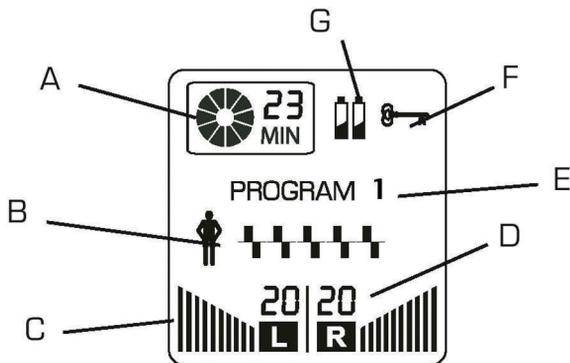

L'apparecchio ha un display di grandi dimensioni che informa in ogni momento sullo stato dei diversi parametri in funzione sull'unità.

A. Timer:

Indica il tempo rimanente, in minuti, di ogni programma. L'area del timer comprende una rappresentazione grafica circolare in movimento durante l'esecuzione.

B. Indicatore di esecuzione:

La figura della sagoma e degli impulsi indicano la corretta esecuzione del programma. Gli impulsi rappresentati graficamente sono animati in modo diverso per ogni programma. Fino a quando questa area è accesa, significa che un programma è in esecuzione.

C. Indicatore grafico d'intensità:

La sbarra grafica mostra il livello dell'intensità in uso.

D. Indicatore numerico d'intensità:

Indica il livello dell'intensità utilizzata, in una scala compresa tra 0 e 20.

E. Indicatore Programma:

Vi indica il programma selezionato.

F. Indicatore di blocco:

Indica quando i tasti dell'unità sono bloccati e non possono essere premuti accidentalmente.

G. Indicatore di batteria scarica:

L'indicatore lampeggia quando le batterie stanno esaurendo la propria carica.

Primo utilizzo

- 

1. Posizionare gli elettrodi sulla zona da trattare (vedere posizionamento elettrodi di questo manuale) e collegare i cavi.
- 

2. Premere il tasto ON/OFF per 3 secondi e accendere l'elettrostimolatore.
Il display si accende e indica l'ultimo programma eseguito. Gli indicatori di intensità sono a 0 su entrambi i canali.
- 

3. Selezionare il programma che si desidera eseguire premendo il tasto P+ o P-.
- 

4. Per aumentare l'intensità del canale sinistro (L) premere il tasto in corrispondenza della freccia ▲ sempre mantenendo una stimolazione confortevole.
Per diminuire l'intensità del canale sinistro (L) premere il tasto in corrispondenza della freccia ▼ .
- 

5. Per aumentare l'intensità del canale destro (R) premere il tasto in corrispondenza della freccia ▲ sempre mantenendo una stimolazione confortevole.
Per diminuire l'intensità del canale sinistro (R) premere il tasto in corrispondenza della freccia ▼ .
- 

6. Per spegnere l'elettrostimolatore (anche in caso di emergenza) premere il tasto ON/OFF per 3 sec.

Nota: Ogni programma ha una durata predefinita. L'intensità si azzerava automaticamente quando il programma termina.

Mettere in pausa un programma

Ogni qualvolta si desidera mettere in pausa il programma, premere il tasto PAUSE. Per tornare all'esecuzione del programma, premere il tasto PAUSE; il programma riprende da dove era stato interrotto.

Funzioni Automatiche

Auto spegnimento

Se l'elettrostimolatore è acceso, l'intensità su entrambi i canali è uguale a 0 e non viene utilizzato per 5 minuti, l'unità si spegne automaticamente.

Rilevamento contatto elettrodi

Se gli elettrodi non sono applicati alla pelle in modo corretto oppure i cavi vengono accidentalmente scollegati (situazione di circuito aperto), l'intensità dei canali si riporta automaticamente a 0.

Nell'eventualità che gli elettrodi non siano correttamente applicati, prima di iniziare un trattamento, non è possibile aumentare l'intensità dei canali.

Questa è una misura preventiva al fine di evitare contrazioni indesiderate.

Rilevamento di batteria scarica

Quando la carica delle batterie è bassa, l'indicatore sul display lampeggia.

Funzione di memoria

L'elettrostimolatore tiene in memoria l'ultimo programma eseguito e lo ripropone quando viene riaccessato. La funzione memoria riporta l'unità al primo programma quando le batterie vengono sostituite.

Intensità di stimolazione

Il valore dell'intensità di corrente necessaria per ottenere una determinata contrazione è del tutto personale, può dipendere dal posizionamento degli elettrodi, dallo strato adiposo, dalla sudorazione, dalla presenza di peli sulla zona da trattare ecc. Per questi motivi una stessa intensità di corrente può fornire sensazioni diverse da persona a persona, da giorno a giorno, dal lato destro a quello sinistro. Durante la stessa seduta di lavoro sarà necessario regolare l'intensità per ottenere la stessa contrazione per effetto di fenomeni di accomodamento.

Funzioni Speciali

Blocco dei tasti

Una volta raggiunto il livello d'intensità desiderato, è possibile bloccare i tasti al fine di evitarne un uso accidentale. Tener premuto il tasto "LOCK" per 3 secondi, appare sul display il simbolo di blocco (chiave) e tutti i tasti vengono bloccati tranne il tasto ON/OFF. Quando i tasti sono bloccati, è impossibile aumentare o diminuire l'intensità o cambiare programma. Per sbloccare i tasti, premere di nuovo il tasto "LOCK" per 3 secondi, il simbolo di blocco (chiave) scompare ed è possibile utilizzare nuovamente tutti i tasti.

Nota:

Nei programmi di lavoro intermittente, nei quali sono previsti cicli di lavoro e di recupero, non è possibile modificare il valore dell'intensità durante il tempo di salita e discesa della contrazione.

Inserimento delle batterie

Spegnere l'apparecchio premendo il tasto ON/OFF per 3 sec.

Abbassare il coperchio delle batterie situato dietro l'unità per accedere allo scompartimento batterie. Inserire 3 x 1,5V AAA Type LR03 batterie Alcaline e riposizionare il coperchio. Le batterie devono essere posizionate con la corretta polarità indicata nello scompartimento. Posizionare le batterie in modo errato può causare danni all'unità.

Connessione dei cavi

E' possibile utilizzare uno o due cavi a seconda che si sia scelto di usare uno o due canali dell'unità.

Per la connessione, inserire il connettore del cavo nell'apposito alloggiamento posizionato nella parte inferiore dell'unità. Gli alloggiamenti sono posizionati esattamente sotto il canale corrispondente (sinistro o destro). Inserire il cavo in corrispondenza del canale che si intende utilizzare.

Applicazione degli elettrodi

Prendere gli elettrodi dalla confezione originale; tutti gli elettrodi nuovi hanno una confezione sigillata.

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

Per iniziare, connettere i due spinotti dei cavi agli elettrodi, poi staccare gli elettrodi dalla loro sede e posizionarli sulla pelle. Per il corretto posizionamento degli elettrodi, fare riferimento alle immagini riportate sul presente manuale.

Dopo l'uso, riposizionare gli elettrodi nell'apposita sede.

ATTENZIONE: Non staccare gli elettrodi se l'unità è in funzione.



Se quando aumento l'intensità a più di 10 mA l'intensità ritorna immediatamente a 0, cosa è successo?

L'apparecchio dispone di un controllo sull'erogazione di corrente. Nel caso in cui si aumenti il valore dell'intensità e il circuito sia aperto (cavi non collegati all'apparecchio e elettrodi non a contatto con la pelle), l'apparecchio entra in protezione automatica.

E' necessario quindi prima di iniziare qualsiasi trattamento, assicurarsi che i cavi siano collegati al l'apparecchio e gli elettrodi siano posizionati sulla zona da trattare .

Compare l'indicatore di batteria scarica. Cosa fare?

Dopo alcune applicazioni, con acceso l'indicatore di batteria scarica, sarà necessario sostituire le batterie.

Ci si può far male con l'elettrostimolazione?

E' difficile procurarsi danni muscolari. Un principio importante da seguire è di aumentare gradualmente l'intensità facendo attenzione al comportamento del muscolo. In caso di incertezza rivolgersi ad uno specialista.

E' possibile utilizzare l'elettrostimolatore durante il ciclo mestruale?

Eventuali interferenze, quali anticipazione, ritardo, accentuazione o riduzione del ciclo risultano essere estremamente soggettive e variabili. Si consiglia comunque di evitare trattamenti nella zona addominale durante il ciclo e nell'immediato pre-post ciclo.

E' possibile utilizzare l'elettrostimolatore durante l'allattamento?

Ad oggi non sono stati riscontrati effetti collaterali per quanto riguarda l'impiego dell'elettrostimolazione durante l'allattamento. Si consiglia comunque di non trattare la zona toracica.

La presenza di patologie dermatologiche quali psoriasi, orticaria ecc. vietano l'utilizzo dell'elettrostimolatore?

Si, è decisamente sconsigliato trattare tutte le zone epidermiche che presentino patologie dermatologiche importanti.

Dopo quanto tempo si possono vedere i primi risultati?

I risultati ottenuti in campo estetico sono naturalmente soggettivi. E' possibile affermare comunque che, per quanto riguarda la tonificazione, una frequenza di 3-4 sedute settimanali regolari e costanti possono portare ad un buon risultato già dopo 15 giorni; per i trattamenti di lipolisi e drenaggio occorrono invece 40 giorni. Risultati migliori e più rapidi si ottengono se i trattamenti vengono abbinati ad una buona attività fisica ed ad un corretto stile di vita.

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia, nel caso in cui l'utilizzatore utilizzi lo stesso a scopo professionale, è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio, batterie, caricabatterie, alimentatori, cavi, etc;
- novanta (90) giorni per i supporti contenenti software come, ad esempio, CD-rom, schede di memoria, ecc..
- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi "di consumo" come, ad esempio, elettrodi, etc.

La presente Garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontrino alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore o caricabatterie non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

ASSISTENZA AI PRODOTTI









Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso contenute nel manuale e di consultare il sito nell'area Club MyGlobus sotto la voce "cosa fare in caso di problemi".

In caso si debba inviare il prodotto in assistenza, rivolgersi al proprio negoziante o contattare il Servizio assistenza Globus sul sito www.globuscorporation.com accedendo sempre all'area Club My Globus









L'assistenza ai prodotti può essere chiesta al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto o consultando il sito Globus nell'area Club My Globus.

Le dimensioni, le caratteristiche riportate e le fotografie nel seguente manuale non sono vincolanti. Il produttore si riserva il diritto di approntare modifiche senza preavviso.









+ = Rosso

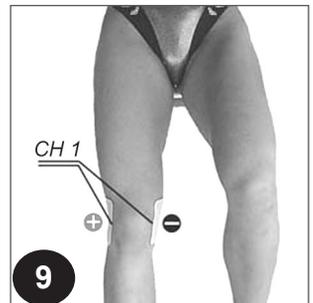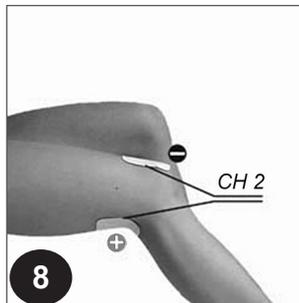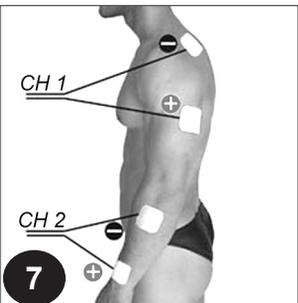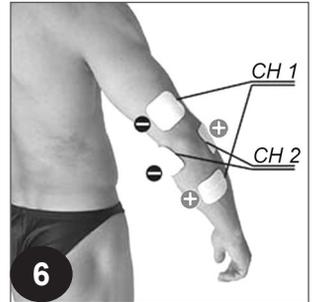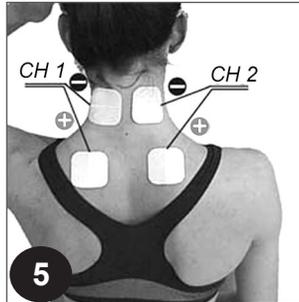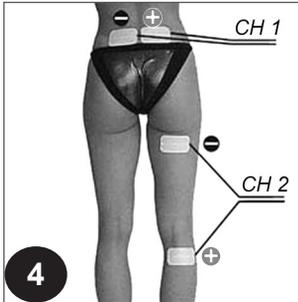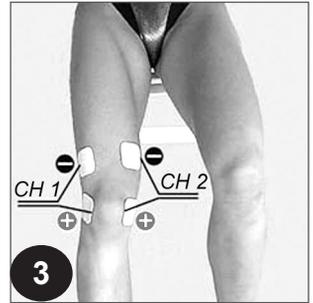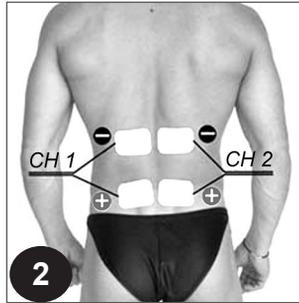

+ = Rosso

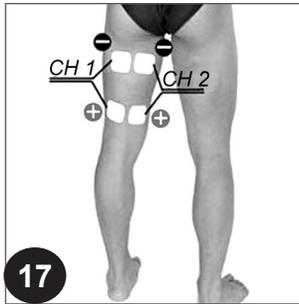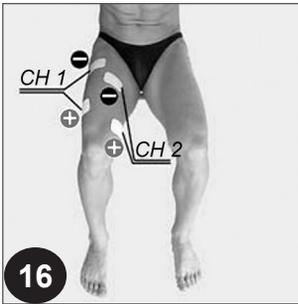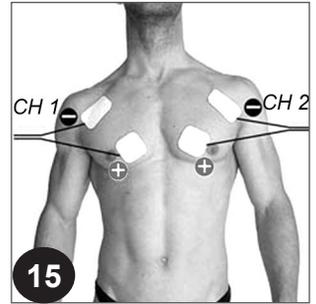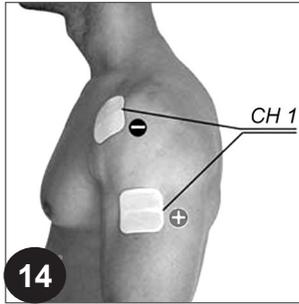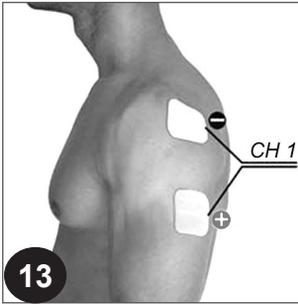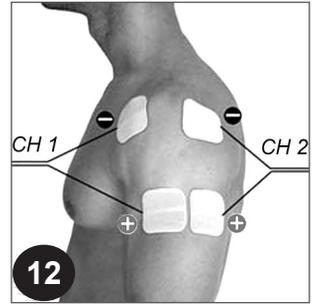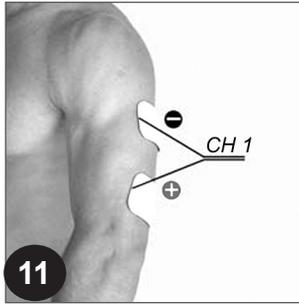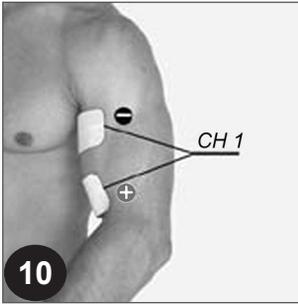

+ = Rosso

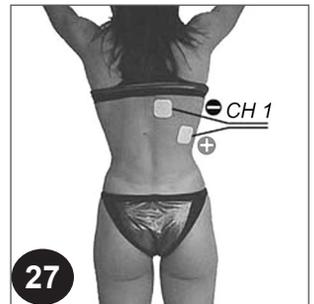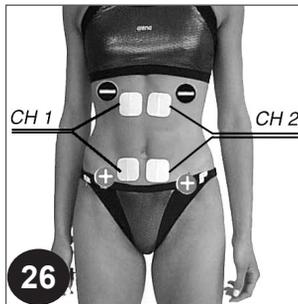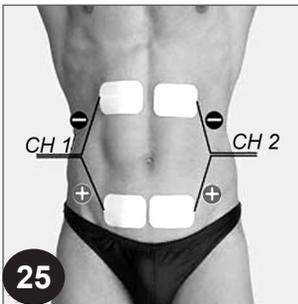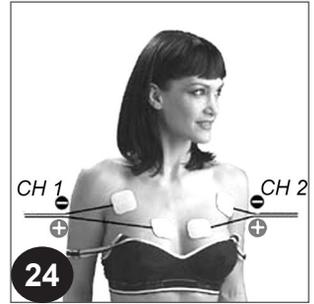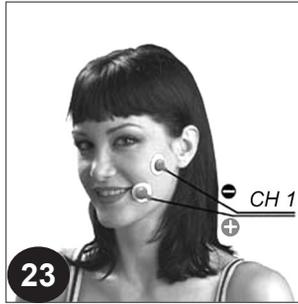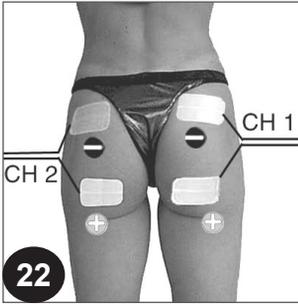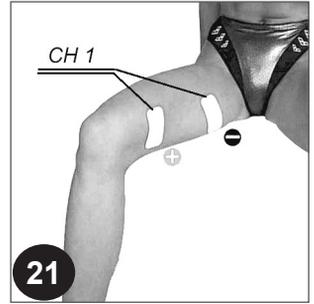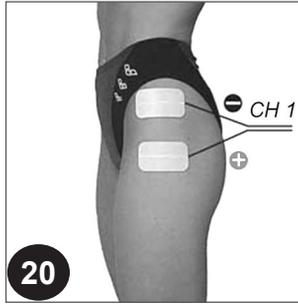

+ = Rosso

**WITH CABLES
ACCESSORY
KIT**

