

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
MESIS

Pressoterapia – Infrarossi riscaldanti - Elettrostimolazione

3 IN 1
PRESSOTHERAPY MACHINE



MESIS



Egregio cliente,

la ringraziamo per aver scelto questa apparecchiatura, potrà apprezzare l'alta qualità dei materiali e le caratteristiche che contraddistinguono questi modello.

Augurandole un uso **confortevole** le ricordiamo di **leggere il manuale prima dell'uso.**

Indice

Pag. 4	Pressotherapy Machine 3in1
Pag. 5	Avvertenze
Pag. 8	Modalità di esercizio
Pag. 9	Ambiente d'utilizzo
Pag. 10	Avvertenze e controindicazioni
Pag. 14	Caratteristiche tecniche
Pag. 15	Display e comandi
Pag. 16	Schemi dei comandi
Pag. 17	Connessione tubi alla machina e accessori
Pag. 19	Istruzioni operative
Pag. 22	Posizionamento elettrodi
Pag. 23	Manutenzione, risoluzione dei problemi
Pag. 25	Garanzia
Pag. 27	Dichiarazione di conformità

Il prodotto deve essere utilizzato nel rispetto di quanto scritto nel presente manuale.

Il produttore e il distributore declinano ogni responsabilità in merito ad un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di qualsiasi foto o testo contenuti in questo manuale.

VIMA di B.W.

Logistica: Via Marco Polo 17, 10129 Torino

fax 011.07.04.904

email: healthitaly@gmail.com

PRESSOTHERAPY MACHINE 3 IN 1

Il prodotto modello AB – 6010 è una macchina che combina tre diverse metodologie che si legano tra loro:

- pressoterapia (agisce su cellulite, adiposità localizzata e ritenzione di liquidi),
- infrarosso riscaldante (agisce su grasso localizzato)
- elettro stimolazione (azione sui muscoli).

Viene utilizzata per il trattamento estetico del corpo.

La macchina è idonea per un utilizzo in ambito estetico, non è un prodotto medicale.

Pressoterapia, infrarossi e stimolazione sono trattamenti ormai utilizzati da anni con **effetti visibili e concreti**.

- **pressoterapia**
- **infrarosso riscaldante**
- **elettrostimolazione**

E' possibile effettuare tutte e tre le metodiche simultaneamente, effettuarne due insieme, oppure una soltanto.

Grazie ad un sistema ottimizzato di controllo e comando, è sufficiente escludere le metodiche che non si intende utilizzare premendo sugli appositi tasti di comando settoriale, subito dopo l'avvio dei trattamenti.

La dichiarazione di conformità è presente in questo manuale in penultima pagina.

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.

Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come macchina per la pressoterapia 3 in 1 (pressoterapia, infrarosso riscaldante ed elettro stimolazione) per utilizzo in centri estetici.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno o il centro estetico un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

ATTENZIONE: non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

NON bloccare le feritoie di aria dell'apparecchio e non appoggiare l'apparecchio sopra una superficie morbida come un letto o divano, dove si potrebbero bloccare le feritoie.

Lasciare libere le feritoie di aria.

Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto e verificare quanto presente in questo manuale.

Attenzione l'apparato deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti indoor e conformemente alle istruzioni d'uso. In caso di guasto del cavo di alimentazione lo stesso deve essere sostituito da un centro di assistenza VIMA di B.W..

L'impianto elettrico a cui è connesso l'apparato deve essere conforme al DM 37/08 ed in particolare devono essere previste tutte le misure di sicurezza in impianto quali sezionatori magnetotermici sulle linee di alimentazione principali.

Conservare e maneggiare il prodotto con cura. In caso il prodotto presenti danneggiamenti è vietato l'utilizzo.

Non posizionare vicino a fonti di calore troppo forti;

Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la superficie: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario.

Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

Non utilizzare in soggetti con stimolatore cardiaco o un defibrillatore interno.

Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore.

Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore.

Durante la pulizia disinserire l'alimentazione.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.

Non usate mai il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o eruzioni della pelle.

L'utilizzo è esclusivamente in ambiente di tipo residenziale / piccolo ufficio.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il fabbricante informa sul corretto uso degli articoli. Pertanto attenetevi sempre a queste istruzioni che assicurano una corretta ed appropriata installazione nonché funzionamento e conservatele quindi per future consultazioni.

- Posizionate l'interruttore su 0 (zero) o OFF appena terminato l'utilizzo.
- Effettuate la pulizia degli articoli con panni asciutti e non usate nè solventi nè prodotti abrasivi. Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche.
- Tenete sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche dell'apparecchio. Verificate i simboli che si trovano sull'etichetta di identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte A delle Vostre istruzioni di sicurezza.
- Smaltimento di vecchi prodotti: Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo all'interno.

Non è adatto per essere installato in sale da bagno.

L'articolo è adatto per l'allacciamento diretto alla rete solo attraverso il proprio alimentatore.

Collegamento Y: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi.

Durante l'installazione assicuratevi di non fare fori in corrispondenza dell'impianto elettrico esistente nel muro o nel soffitto.

I cavi elettrici di collegamento non devono mai essere attorcigliati e pressati nello spazio tra la lampada e la superficie d'appoggio.

Questo prodotto non è adatto per bambini.

Non trattare:

- portatori di impianti attivi come: Pace-maker, pompa insulina o altri;
- portatori di protesi articolari metalliche;
- soggetti con processi flogistici in atto, con lesioni cutanee, con neoplasie;
- donne in stato di gravidanza.
- non trattare soggetti con pelle sensibile, eventualmente limitarsi a potenze di erogazione molto basse.
- applicare solo su pelle integra.

MODALITA' DI ESERCIZIO:

Pulire accuratamente la parte che si deve trattare. E' opportuno sia ben sgrassata, in caso contrario gli elettrodi, trasferiranno l'energia in modo incostante e spesso fastidioso.

Collegare gli elettrodi all'apparecchio con gli appositi cavi rispettando le indicazioni riportate nel manuale d'uso. Gli elettrodi devono essere posizionati (fissi) sulle zone da trattare.

Rispettare le polarità e le zone di applicazione degli elettrodi fissi come riportato sui manuali d'uso.

Il tempo di applicazione varia in funzione del trattamento da effettuare ed è, di norma variabile tra 15 e 60 minuti.

L'attivazione non deve essere possibile se le uscite non sono programmate per valori minimi. E' consigliabile procedere alla regolazione di intensità di corrente erogata, azionando lentamente i relativi comandi, avendo cura di operare con valori appena percettibili dal soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti dalla Norma CEI 62-24-1997.

Dove possibile, l'incremento di intensità deve essere automaticamente graduale. Il soggetto trattato non dovrà avvertire fastidio, in caso contrario diminuire l'intensità di erogazione.

Disattivando l'erogazione, l'intensità programmata si riporterà automaticamente a zero.

Controllare sempre il buono stato degli elettrodi e seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale d'uso.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale d'uso.

La macchina per pressoterapia 3 in 1 per trattamento estetico è disegnata, prodotta e testata in conformità con le più severe norme standard di sicurezza Europee.

In caso di difetto di costruzione o materiale danneggiato il produttore offre la garanzia di due anni per gli apparecchi da interno e sugli articoli da esterno. (a meno che sia indicato diversamente sull'imballaggio) Vetri rotti, batterie e fonti di luce non rientrano nei termini di garanzia.

Qualsiasi danno arrecato dall'utilizzo dell'apparecchio per illuminazione in circostanze eccezionali (area costiera, zona industriale, contatti frequenti con concime organico...) non è coperto dalle condizioni di garanzia.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto ed è valida solo su presentazione di fattura o ricevuta fiscale. La garanzia decade se l'articolo non è stato installato seguendo le dovute istruzioni, oppure se riparato o manomesso.

Il fabbricante inoltre non si ritiene responsabile dei danni causati da un cattivo utilizzo od errata applicazione delle istruzioni.

Modifiche tecniche o di disegno sono riservate.

AVVERTENZE AMBIENTE

Al termine della normale vita utile del prodotto, provvedere al suo smaltimento secondo le norme locali in vigore.

– se si utilizza il prodotto in locali da bagno (NON CONSIGLIATO), è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza coll'acqua può rappresentare un pericolo anche quando il prodotto è spento;

– al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile.

La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.

Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come vaporizzatore facciale per utilizzo in centri estetici. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno o il centro estetico un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

AVVERTENZE

- Prima dell'uso leggere attentamente il manuale in ogni sua parte;
- Tenere questo manuale vicino alla presstherapy machine, così da poterlo consultare in ogni momento;
- Questo manuale spiega nel dettaglio il corretto utilizzo delle apparecchiature per prevenire pericoli e danni a persone o cose.

Significato dei simboli presenti in questo manuale



Attenzione

In caso di mancata osservanza delle istruzioni si può incorrere in gravi ferite e pericolo di morte.



Precauzioni

In caso di mancata osservanza delle istruzioni, l'utente potrebbe causarsi delle lesioni o danni all'apparecchiatura.

Indicazioni



Indica una restrizione



E' una indicazione da seguire correttamente



Vieta il disassemblamento



Indica di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro



Attenzione

Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi: Persone che soffrono di infiammazioni o ferite a rischio di sanguinamento sia interne che esterne, no deve utilizzare il prodotto anche chi soffre di infiammazione purulenta. Portatori di Pace Maker.

Controindicazioni pressoterapia e infrarossi riscaldanti

- Edema polmonare
- Tromboflebiti
- Insufficienza cardiaca
- Infezioni
- Trombosi venosa profonda
- Episodi di embolia polmonare
- Ferite, lesioni o tumori nella zona di applicazione o nelle vicinanze in cui un maggiore ritorno venoso e linfatico potrebbe risultare dannoso
- Portatori di Pace Maker
- Linfngiti
- Plessopatia e neuropatia

Controindicazioni elettrostimolazione e infrarossi riscaldanti

- Persone portatrici di dispositivi elettronici quali pacemaker e defibrillatori intracardiaci.
- Persone che soffrono di epilessia.
- Stimolazione della zona addominale nella donna incinta.
- Posizionamento degli elettrodi sulla parte anteriore e laterale del collo.
- Stimolazione della zona toracica di persone che presentano un'aritmia cardiaca.
- Stimolazione degli arti inferiori in caso di trombosi venosa o di ostruzione arteriosa grave (ischemia).
- Stimolazione della zona addominale in caso di ernia addominale o inguinale.

ATTENZIONE, in caso di problemi di salute particolari, è tuttavia raccomandato chiedere consiglio a un professionista della salute.

AVVERTENZE



Attenzione

Se durante l'utilizzo ci si sente male o si hanno dei dolori, non utilizzare l'apparecchiatura. Sospendere immediatamente l'utilizzo.



Per la prima volta, utilizzare l'apparecchiatura per meno di 20 minuti. Aumentare eventualmente il tempo nelle sedute successive in base alla tollerabilità del proprio corpo. Iniziare il trattamento partendo dalla pressione minima.



Vietati l'utilizzo per i bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di scosse elettriche o altri danni.



Non utilizzare acqua o altre sostanze che potrebbero inserirsi all'interno dell'apparecchiatura.



Nel caso di guasto o malfunzionamento non aprire o cercare di riparare l'apparecchiatura. Possibili scosse elettriche e lesioni a persone e cose.



Quando collegate o scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica (presa) le mani devono essere asciutte. Possibili scosse elettriche e lesioni a persone e cose. Pericolo di incendio.



Utilizzare esclusivamente corrente 220V monofase. Dopo aver utilizzato l'apparecchiatura, scollegare correttamente il cavo dalla rete elettrica. Possibili scosse elettriche e lesioni a persone o cose. Pericolo di incendio.



Lasciare libero il cavo di alimentazione, non mettere sopra, schiacciarlo o pizzicarlo con alcun oggetto.

Possibili scosse o dispersioni elettriche. Pericolo di incendio.




AVVERTENZE



Attenzione

Utilizzare una presa della corrente ad uso esclusivo dell'apparecchiatura. Troppe spine potrebbero causare un principio di incendio, dispersioni elettriche e scosse di corrente.

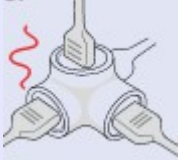


Non dare colpi all'apparecchiatura, non farla cadere. Potrebbero provocare gravi danni all'apparecchiatura.



Non inserire nessun oggetto o prodotto all'interno dell'apparecchiatura. Rischio di danni all'apparecchiatura e alle persone.



Non mettere l'apparecchiatura e i suoi accessori vicino a fonti di calore. Potrebbe causare seri danni all'apparecchiatura e/o accessori.

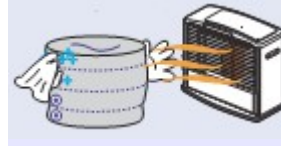

Quando si indossano i gambali, fascia addominale, bracciale o elettrodi non muoversi e camminare.



Non porre l'apparecchiatura e i suoi accessori all'irraggiamento solare diretto o di stufe a gas. Potrebbero causare deperimento, deformazione e scolorimento dei prodotti.



Non utilizzare l'apparecchiatura per un uso diverso dal massaggio. Rischio di danno alle persone e alle apparecchiature.



Non piegare, annodare, tagliare o rompere il cavo elettrico.



AVVERTENZE



Attenzione

Non mettere nessun oggetto sopra l'apparecchiatura. Non appoggiare pesi sulla macchina o sulle connessioni ad essa, nè su cavi elettrici e tubi di raccordo dell'aria. Potrebbe causare variazioni alla pressione.



Quando non utilizzate l'apparecchiatura da molto tempo o in un luogo freddo, potrebbe non funzionare regolarmente, quindi una volta accesa, lasciare in funzione ad una pressione bassa almeno per 3 cicli di gonfiaggio.



Per pulire gli accessori (gambali, bracciali etc...) non utilizzate acqua, olio, benzina o sostanze chimiche. Utilizzare un panno umido. Potrebbero rovinarsi accorciando la durata nel tempo degli stessi.



Non utilizzare gli accessori direttamente sulla pelle. Indossare sotto gli applicatori della biancheria adeguata.



Per pulire l'apparecchiatura non utilizzate acqua, olio, benzina o sostanze chimiche. Utilizzare un panno umido.



Non piegare, annodare o tagliare i tubi dell'aria.



Prodotto soggetto alle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata (Direttiva RAEE). Smaltire nelle apposite aree.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE:

ALIMENTAZIONE: AC220V 50Hz

CLASSE DI ISOLAMENTO: classe 1

TIMER: Regolabile da 0 a 60 minuti

DIMENSIONI: Macchina: 106 × 58 × 48 (cm.)

Coperta: 50 × 46 × 35 (cm.)

PESI: Macchina: 34kg.

Coperta: 6,6 kg

POTENZA ASSORBITA: 300W

PRESSIONE: 0-150 mmHg. (+-10%)

GARANZIA: fare riferimento alla pag. 25 di questo manuale

CERTIFICAZIONE: CE

DESTINAZIONE D'USO: ambienti residenziali, commerciali. A solo uso estetico

ETICHETTA:



Pressoterapia:

- 10 settori
- 4 programmi
- 9 livelli di velocità dei cicli
- regolazione della pressione 0 – 150 mmHg. (+-10%)
- possibilità di deselezionare alcuni applicatori


Infrarossi riscaldanti

- 5 canali
- 8 livelli di intensità di calore

Elettrostimolazione

- 5 canali
- modo automatico (effettua tutti i programmi secondo una sequenza preimpostata dal produttore)
- modo manuale (5 programmi selezionabili)





DISPLAY E COMANDI

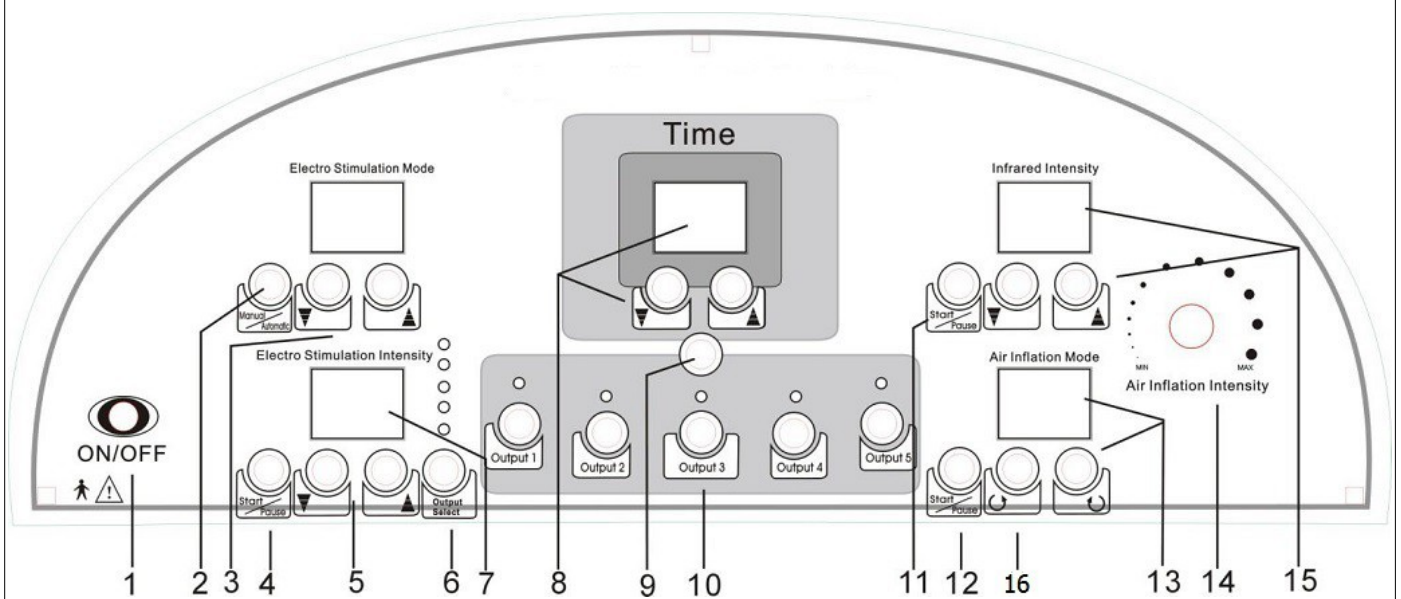


1. Accensione e spegnimento display
2. Elettrostimolazione, selezione modo manuale o automatico (puntino rosso lampeggiante = automatico)
3. Elettrostimolazione, selezione programma, solo se è stato precedentemente selezionato il modo manuale
4. Elettrostimolazione, start/pause (puntino rosso lampeggiante, trattamento in funzione)
5. Elettrostimolazione, tasti di regolazione dell'intensità
6. Elettrostimolazione, tasto di selezione del canale per aumentare o diminuire l'intensità
7. Elettrostimolazione, display dell'intensità
8. Display del tempo di lavoro e tasti per aumentare o diminuire il tempo di lavoro
9. Tasto di avvio dei trattamenti
10. Pressoterapia, tasti di selezione dei settori da gonfiare (all'accensione sono tutti attivati)
11. Infrarossi riscaldanti, start/pause (puntino rosso lampeggiante, trattamento in funzione)
12. Pressoterapia, start/pause (puntino rosso lampeggiante, trattamento in funzione)
13. Pressoterapia, tasto di selezione della velocità dei cicli (seconda cifra a destra del display)
14. Pressoterapia, manopola di regolazione dell'intensità dell'aria nelle camere
15. Infrarosso riscaldante, display del livello di intensità e tasti di regolazione del livello di intensità del calore
16. Pressoterapia, tasto di selezione del programma (prima cifra a sinistra sul display)

Attenzione: led rosso lampeggiante = trattamento in funzione
led rosso fisso = trattamento in pausa

SCHEMI DEI COMANDI

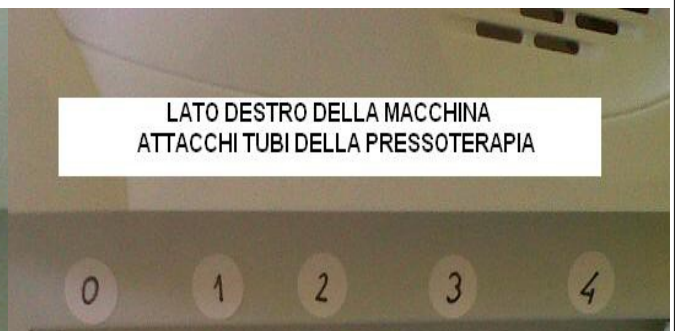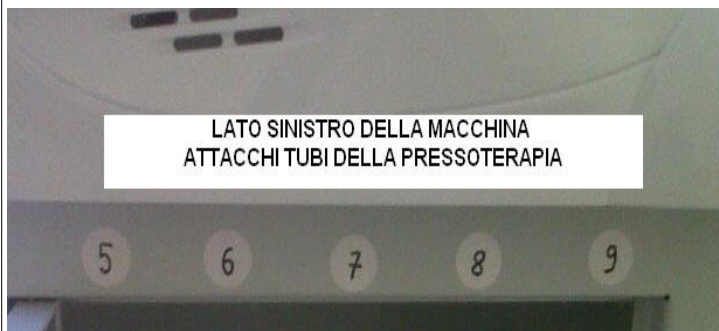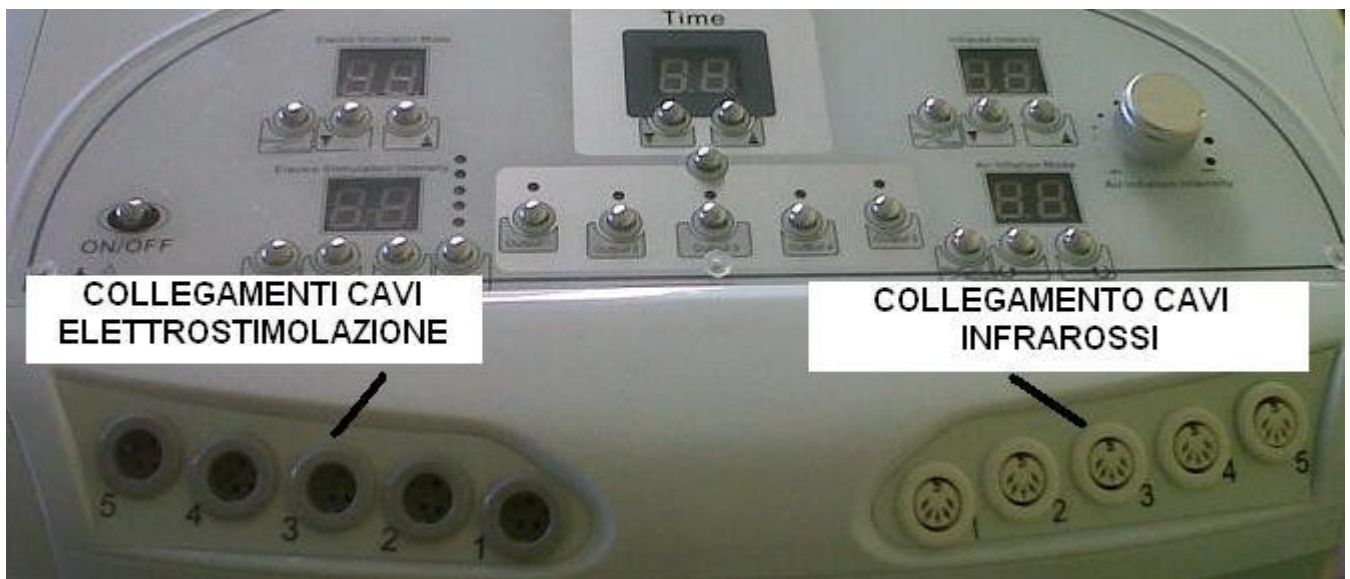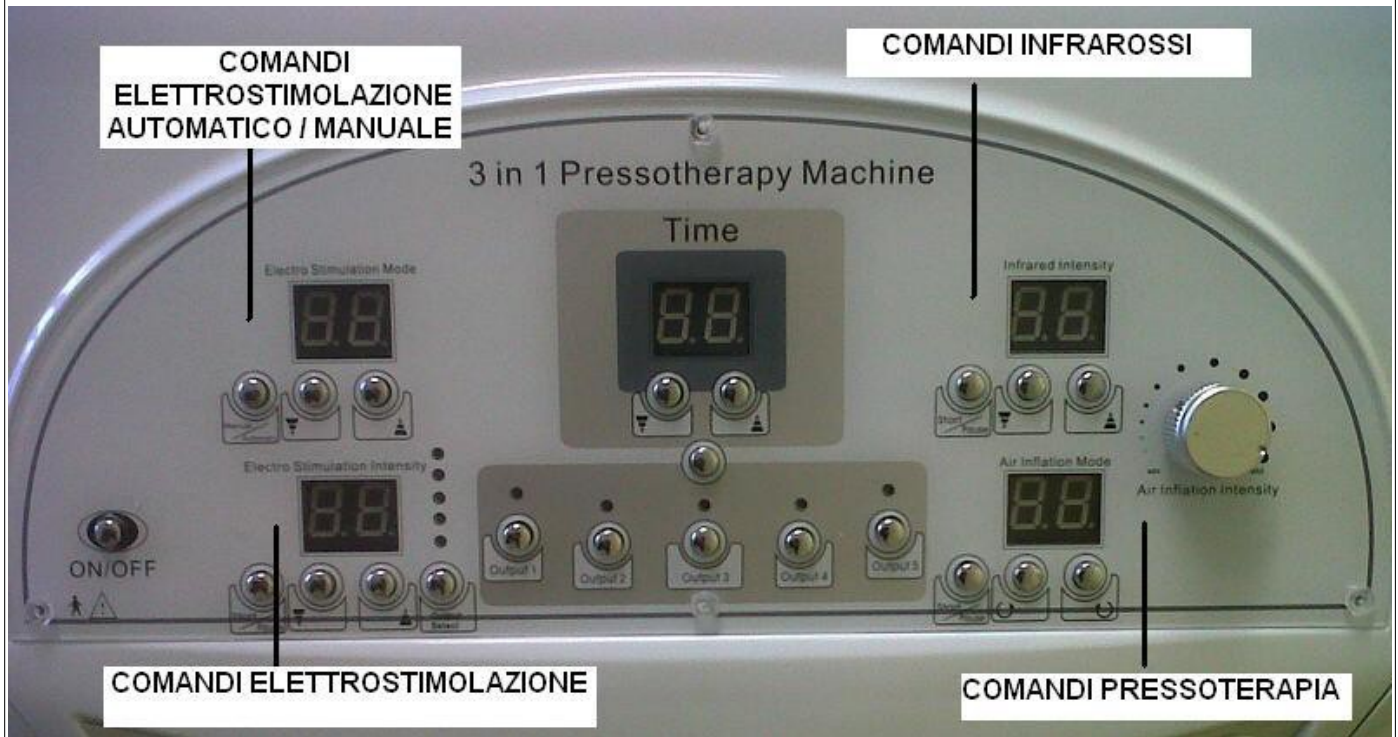


POSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTI

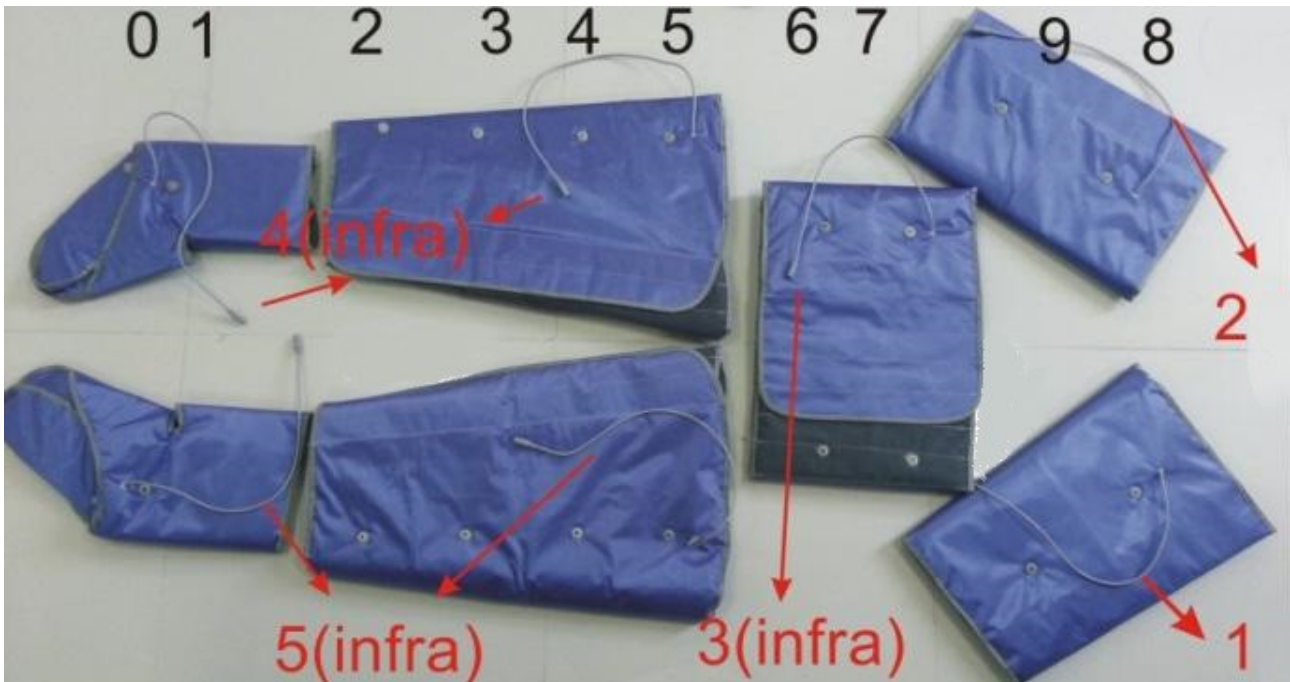

● Uscite pressoterapia

● Uscite infrarossi riscaldanti (posizionare gli applicatori come in figura, seguendo la corretta numerazione)

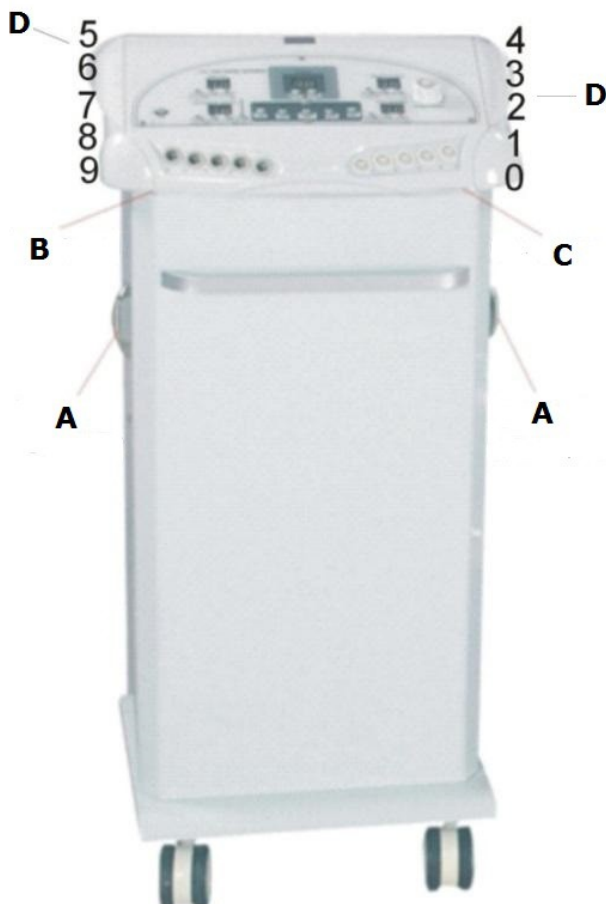

- **A** sportello vano attacchi pressoterapia
- **B** collegamento cavi elettrostimolazione
- **C** collegamento cavi infrarosso riscaldante
- **D** collegamento tubi della pressoterapia, all'interno degli sportelli

DOTAZIONE:

- 2 piedi
- 2 gambe
- 1 fascia addominale
- 2 braccia
- tubi di raccordo per pressoterapia
- cavi di raccordo per infrarossi riscaldanti
- 5 cavi e 10 elettrodi per elettrostimolazione
- 1 cavo alimentazione
- fasce per elettrodi
- manuale in Italiano

COLLEGAMENTO CAVI E TUBI SUGLI ACCESSORI



Connessione elettrodi ai cavi




Cavi di collegamento della pressoterapia e degli infrarossi riscaldanti (per connettere ogni tubo della pressoterapia alla macchina, spingere il connettore con la numerazione corretta verso l'alto e ruotarlo verso destra)



Connessione dei cavi della pressoterapia agli applicatori

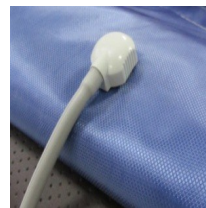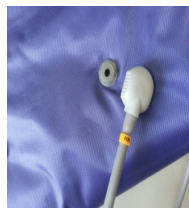

Connessione dei cavi degli infrarossi riscaldanti agli applicatori

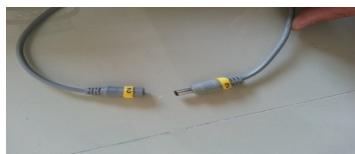

IMPORTANTE: Collegare correttamente facendo attenzione a unire i cavi con la numerazione uguale corrispondente.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Attenzione: led rosso lampeggiante = trattamento in funzione
led rosso fisso = trattamento in pausa

IMPORTANTE: seguire la numerazione corretta (schede a pagg. 16,17,18)

1. Connettere i cavi della pressoterapia alla macchina.
2. Connettere i cavi dell'elettrostimolazione sulla macchina se si decide di utilizzare l'elettrostimolazione, altrimenti non collegarli.
3. Connettere i cavi dell'infrarosso riscaldante sulla macchina.
4. Connettere i cavi dell'infrarosso riscaldante agli applicatori.
5. Connettere i tubi della pressoterapia agli applicatori (il tubo passa all'interno delle due gambe).
6. Connettere i cavi dell'elettrostimolazione agli elettrodi (se si è deciso di non utilizzare l'elettrostimolazione non collegare i cavi alla macchina)
7. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione alla rete elettrica e successivamente alla macchina
8. Accendere la macchina attraverso il tasto nero posto sul retro (tasto nero 1/0), portarlo nella posizione 1
9. Rendere operativo il display della macchina premendo il tasto 1 (ON/OFF)
10. All'accensione della macchina tutti i trattamenti sono programmati per essere eseguiti, nel caso in cui non si intenda utilizzare qualche trattamento è necessario disinserirlo. attraverso i tasti 4, 11, 12 . (il pallino rosso all'interno del display cesserà di lampeggiare)
Il tempo di lavoro è preimpostato su 30 minuti, è possibile modificarlo attraverso i tasti 8

- **per disinserire l'elettrostimolazione premere il tasto 4** (il puntino rosso lampeggiante sparisce, il trattamento è in pausa) NON SELEZIONATO

- **per disinserire l'infrarosso riscaldante premere il tasto 11** (il puntino rosso lampeggiante sparisce, il trattamento è in pausa) NON SELEZIONATO

- **per disinserire la pressoterapia premere il tasto 12** (il puntino rosso lampeggiante sparisce, il trattamento è in pausa) NON SELEZIONATO

Per far partire i trattamenti selezionati premere il tasto numero 9, se non si disinseriscono, all'accensione la macchina è programmata per effettuare tutti e tre i trattamenti contemporaneamente.

Se si vuole utilizzare la pressoterapia (prima di premere il tasto 9):

- Selezionare il programma attraverso il tasto 16 (prima cifra del display)
- Selezionare la velocità dei cicli attraverso il tasto 13 (seconda cifra del display)
- regolare la manopola della pressione attraverso la manopola 14 (aspettare almeno due cicli di gonfiaggio per definire la corretta pressione).

Programmi

- **Programma 1**, partendo dalla camera 0 arriva fino alla camera 9 gonfiando ogni singolo settore per volta (gonfia-sgonfia). Ogni volta che inizia a gonfiare la camera successiva, sgonfia quella precedentemente gonfiata.
- **Programma 2**, partendo dalla camera 0 arriva fino alla camera 9 gonfiando prima la camera zero - poi gonfia la camera 1 mantenendo gonfia la camera 0 - poi gonfia la camera 2 sgonfiando la camera 0 - poi gonfia la camera 3 sgonfiando la camera 1 – poi gonfia la camera 4 sgonfiando la camera 2 e prosegue con questa modalità fino alla camera 9.
- **Programma 3**, partendo dalla camera 0 arriva fino alla camera 9 gonfiando ogni singolo settore per volta (gonfia-gonfia). Ogni volta che inizia a gonfiare la camera successiva, mantiene gonfie quelle precedentemente gonfiate.
- **Programma 4**, la macchina gonfia i 3 settori contemporaneamente, "0" "1" "2" "3" "4" "5" - "6" "7" "6" "7" "6" "7" - "9" "8" "9" "8" "9" "8" - Poi si ripete.

Velocità dei cicli

Tempo di gonfiaggio su ogni singola camera prima di passare a quella successiva.

Premendo il tasto n° 13 si seleziona la velocità dei cicli (9 livelli) partendo da molto veloce (1) fino ad arrivare ad una velocità molto lenta (9). Velocità preimpostata 3.

- Velocità 1 = 1,50 secondi
- Velocità 2 = 3 secondi
- Velocità 3 = 4,50 secondi
- Velocità 4 = 6 secondi
- Velocità 5 = 7,50 secondi
- Velocità 6 = 9 secondi
- Velocità 7 = 10,50 secondi
- Velocità 8 = 12 secondi
- Velocità 9 = 13,50 secondi

Regolazione della pressione

- Attraverso la manopola n° 14 è possibile aumentare (ruotando la manopola in senso orario) o diminuire (ruotando la manopola in senso antiorario) la pressione esercitata sugli applicatori.
- Premendo i pulsanti 10 si possono eliminare alcuni applicatori della pressoterapia (i relativi applicatori non si gonfieranno) 1 e 2 corrispondono alle braccia, 3 alla fascia addominale e 4 e 5 alle gambe.

ATTENZIONE, Il trattamento non deve provocare nessun fastidio, in tal caso ridurre la pressione esercitata e se il fastidio non cessa, interrompere immediatamente il trattamento.

- **Controindicazioni specifiche**

Edema polmonare, tromboflebiti, insufficienza cardiaca, infezioni, trombosi venosa profonda, episodi di embolia polmonare, ferite, lesioni o tumori nella zona di applicazione o nelle vicinanze in cui un maggiore ritorno venoso e linfatico potrebbe risultare dannoso, portatori di Pace Maker, linfngiti, plessopatia e neuropatia.

In caso di problemi di salute particolari, è tuttavia raccomandato chiedere consiglio a un professionista della salute.

Se si vuole utilizzare l'infrarosso riscaldante (prima di premere il tasto 9):

- Regolare l'intensità del calore su un valore basso ed aumentarla successivamente (tasti 15) a trattamento iniziato fino al raggiungimento della temperatura desiderata, mantenere livelli di temperatura bassi.

ATTENZIONE, se si avverte troppo calore ridurre immediatamente la temperatura ed eventualmente mettere in pausa per qualche minuto il trattamento.

Se si vuole utilizzare l'elettrostimolazione (prima di premere il tasto 9):

Collegare gli elettrodi ai cavi, posizionarli sulla zona da elettrostimolare, facendo attenzione a mettere del gel tra l'elettrodo e la pelle.

E' possibile selezionare il programma da utilizzare (manuale 5 programmi) oppure utilizzare il sistema automatico (la macchina esegue una sequenza preimpostata tra tutti i programmi).

All'accensione la macchina è preimpostata sul sistema automatico, premendo il pulsante n°2 è possibile passare in modalità manuale (il puntino rosso sul display sparisce), per ritornare alla modalità automatica premere nuovamente il pulsante n°2. Con la modalità manuale (il puntino rosso non c'è sul display) è possibile attraverso i pulsanti n° 3 selezionare il programma che si desidera.

Programmi in modalità manuale

- 1 – Cellulite,
- 2 – Massaggio profondo,
- 3 – Tonificante,
- 4 – Stimolante,
- 5 – Rilassante.

Aumentare su ogni canale (tasto 6 modifica il canale selezionato, il led sopra più in alto è il canale 1, il led sopra più in basso è il canale 5) l'intensità desiderata, una volta raggiunta la giusta intensità su un canale passare a quello successivo.


- E' **IMPORTANTE** che ad inizio trattamento la macchina sia impostata su ogni canale sull'intensità minima impostabile, successivamente aumentare l'intensità gradualmente secondo le proprie esigenze senza provocare mai dolore o fastidio.
- E' indispensabile iniziare qualsiasi trattamento di elettrostimolazione con una intensità minima, aumentando gradualmente l'intensità secondo le proprie esigenze.

ATTENZIONE, Il trattamento non deve provocare nessun fastidio, in tal caso ridurre l'intensità sul canale che genera fastidio e se il fastidio non cessa, interrompere immediatamente il trattamento.

Controindicazioni specifiche

- Persone portatrici di dispositivi elettronici quali pacemaker e defibrillatori intracardiaci.
- Persone che soffrono di epilessia.
- Stimolazione della zona addominale nella donna incinta.
- Posizionamento degli elettrodi sulla parte anteriore e laterale del collo.
- Stimolazione della zona toracica di persone che presentano un'aritmia cardiaca.
- Stimolazione degli arti inferiori in caso di trombosi venosa o di ostruzione arteriosa grave (ischemia).
- Stimolazione della zona addominale in caso di ernia addominale o inguinale.
- In caso di problemi di salute particolari, è tuttavia raccomandato chiedere consiglio a un professionista della salute.

POSIZIONAMENTO ELETTRODI

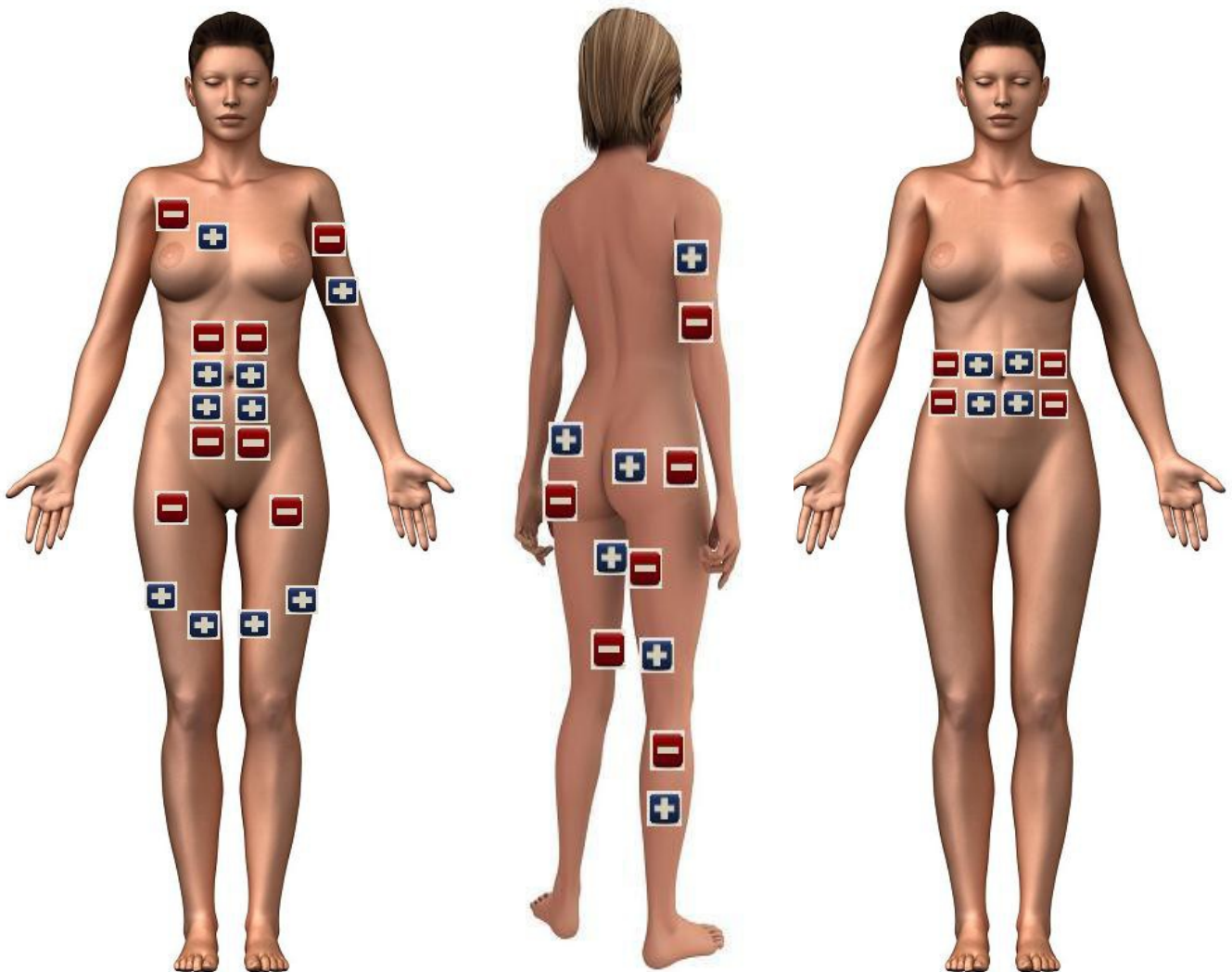

E' indispensabile iniziare qualsiasi trattamento di elettrostimolazione con una intensità minima, aumentando gradualmente l'intensità secondo le proprie esigenze.




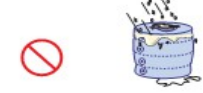
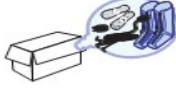
Bisogna applicare tra gli elettrodi e la pelle del gel o della crema conduttiva per aumentarne la conduttività dello stimolo e la confortevolezza del trattamento.

Dopo aver collegato i cavi dell'elettrostimolazione alla macchina, collegare le uscite di ogni canale.

Pulire gli elettrodi dopo l'utilizzo utilizzando una spugnetta umida con l'aggiunta di detergente specifico. NON immergere gli elettrodi in acqua.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Gli accessori non possono essere riparati abbiatene cura

Non posizionate i gambali, bracciale, fascia addominale o altri accessori vicino a fonti di calore dirette o indirette.	
Non posizionare l'apparecchiatura in zone umide o bagnate. Non bagnare in nessun modo l'apparecchiatura, non versare nessun liquido sopra l'apparecchiatura.	
Non lavare con acqua o detersivi l'apparecchiatura e gli accessori. Passare semplicemente un panno umido.	
Non riponete l'apparecchiatura con i suoi accessori in zone particolarmente fredde o sotto lo zero. Potrebbe danneggiarsi in modo serio.	
Se non utilizzate l'apparecchiatura per un lungo periodo, riponetela nella propria scatola.	

Ambiente d'uso e custodia

- Utilizzate e mantenete l'apparecchiatura e i suoi accessori in ambiente pulito e con una temperatura compresa tra i 10 – 40 °C, umidità 30 – 85%;
- Non utilizzare in ambienti esterni.

Problema riscontrato	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto collegamento alla rete elettrica; • Verificare di aver messo nella posizione on (tasto on-off nero) il tasto posto sul retro delle macchine; • Verificare lo stato del cavo di alimentazione. Deve essere integro.
Si percepisce uno strano sibilo simile a quello relativo ad una fuoriuscita dell'aria	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i tubi, gli accessori e i connettori siano integri; • Verificare che tutte le connessioni (alla macchina e agli applicatori) siano inserite correttamente; • Verificare che i tubi di connessione dell'aria non siano piegati, pizzicati o schiacciati.
L'aria non arriva agli applicatori, non c'è sufficiente pressione	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto collegamento dei connettori alla macchina e agli applicatori; • Verificare che i tubi di connessione dell'aria non siano piegati, pizzicati o schiacciati; • Verificare il corretto gonfiaggio delle camere, in maniera progressiva e stabilita dal programma selezionato.
L'aria continua ad entrare nelle camere e si sente una perdita d'aria negli applicatori	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di fori o danneggiamenti nelle camere d'aria degli applicatori. Se non sono presenti anomalie, spegnere il dispositivo, riaccenderlo e verificare nuovamente il corretto funzionamento

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema riscontrato	Possibile soluzione
Alcuni applicatori non si scaldano quando l'infrarossi è in funzione	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il trattamento infrarossi, pulsante 21 sia in modalità funzionante (led rosso lampeggiante);• Verificare che i cavi di connessione tra gli accessori siano correttamente collegati• Verificare che i cavi siano correttamente collegati alla macchina
Con l'elettrostimolatore in funzione non si sente nessun impulso	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il trattamento elettrostimolazione, pulsante 6 sia in modalità funzionante (led rosso lampeggiante);• Verificare che i cavi di connessione siano correttamente collegati agli elettrodi• Verificare che i cavi siano correttamente collegati alla macchina• Verificare il corretto posizionamento degli elettrodi• Verificare la presenza di gel o crema conduttiva tra gli elettrodi e la pelle• Verificare l'intensità su ogni singolo canale

GARANZIA

- L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di dodici (12) mesi, tre (3) mesi per gli applicatori e gli accessori (elettrodi, cavi etc...) dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- Nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi "di consumo"
- La presente Garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi paesi.
- Problemi dovuti a cadute o ad un utilizzo errato del voltaggio;
- Se l'apparecchio è stato aperto o modificato da personale non autorizzato;
- Se l'apparecchio è stato utilizzato in ambienti non idonei;
- Se l'apparecchio non è stato utilizzato seguendo le indicazioni del presente manuale.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

- I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali.
- La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
- La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.
- Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica.
- La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore o caricabatterie non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto.
- La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
- La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

ASSISTENZA AI PRODOTTI

In caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al proprio rivenditore.

Distribuito da:

VIMA di B.W.

Logistica: Via Marco Polo 17, 10129 Torino, Italy

P.I. 08218930017

tel. 848.69.05.68 fax 011.07.04.904

email: healthitaly@gmail.com

VIMA di B.W.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Nome del fabbricante: Always Beauty Company Limited

Indirizzo: No. 44, Changhongchangban Industrial Zone, Baiyun District, Guangzhou

Distribuito da: VIMA di B.W.

Indirizzo Sede Legale: **CORSO EINAUDI 4110129 TORINO**

Indirizzo Logistica: **Via Marco Polo 17, 10129 Torino**

dichiara che i seguenti prodotti:

Modello: AB - 6010

Nome commerciale: 3 in 1 PRESSOTHERAPY MACHINE

funzione specifica: Macchina per trattamenti estetici che combina 3 differenti massaggi: pressoterapia, infrarosso riscaldante ed elettro stimolazione

è conforme al DECRETO 12 MAGGIO 2011, N.110

è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE, ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto, in riferimento alle seguenti normative armonizzate:

conforms to Decree 12 May 2011, N. 110

conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE, ROHS 2011/65/UE in reference to following standards

EN 55014 – 1: 2006 + A1:2009 + A2: 2011

EN 55014 –2 : 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 60335-1: 2012

EN 60335-2-27: 2010

EN 62233: 2008

CEI 62-39:1998

EN 60601-2-10: 2001

TORINO, 12/10/2013

Firma

BOTTEGA WALTER
C.so Einaudi, 41
10129 TORINO
P.I. 08218930017
C.F. BTT WTR 72E24 L219H